

# Aboca, Melilax Adult, 6 mikrowlewek doodbytniczych z promelaxin



Cena: 44,99 PLN

## Opis słownikowy

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Producent / Marka | Aboca               |
| Substancja czynna | -                   |
| Typ produktu      | Wyrób medyczny inny |

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Aboca Melilax Adult Mikrowlewka doodbytnicza z Promelaxin, 6 mikrowlewek

6 jednorazowych mikrowlewek z obudową kaniuli po 10 g

#### Wskazania:

- **Melilax** przeznaczony jest do leczenia zaparć, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w przypadku jelita nadwrażliwego), szczelin odbytu i hemoroidów.
- Produkt oczyszcza jelito i wykazuje działanie ochronne, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości, podrażnienia i stan zapalny obecne w czasie zaparcia. **Melilax** może być stosowany również w ciąży i podczas karmienia piersią.

#### Działanie:

**Melilax** łączy działanie wypróżniające z działaniem ochronnym i w konsekwencji łagodzącym błonę śluzową odbytu. Podwójne działanie **Melilax** uzyskiwane jest dzięki **PROMELAXIN**, kompleksowi miodów nektarowych i spadziowych, odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych na podstawie zawartości monosacharydów, polisacharydów i melanoidyn, wzbogaconemu o frakcję polisacharydową z aloesu prawdziwego i słazu dzikiego.

- **Melilax** ma działanie wypróżniające, które zapewnia bodziec aktywujący defekację.
- Ponadto **Melilax**, dzięki właściwościom przypominającym śluz oraz lepkości, chroni błonę śluzową odbytu podczas

przechodzenia stolca.

- Te szczególne właściwości, w połączeniu z działaniem przeciwutleniającym, nadają produktowi zdolność do ochrony, co prowadzi do łagodzenia błony śluzowej.

## Sposób użycia:

- **Dorośli i młodzież od 12 roku życia:** 1 mikrowlewka 10 g w razie potrzeby.
- W przypadku uporczywych zaparć stosować 2 dawki jednocześnie.
- Nałożyć kilka kropli produktu wokół odbytu i wprowadzić delikatnie kaniulę do odbytu.
- Wcisnąć do końca mikrowlewkę i następnie trzymać ją wciśniętą do momentu całkowitego wciągnięcia kaniuli, aby uniknąć zasysania produktu.

## Skład:

### Substancje czynne 73,2%

Promelaxin, kompleks miodów i polisacharydów z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego. Mianowany na: monosacharydy ? 50%, polisacharydy (ciężar molekularny > 20 000 Dalton) ? 0,3% Zawiera ponadto: mieszanekę wodno-glicerynową, sok z cytryny, olejek eteryczny z lawendy.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0373
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.
- W przypadku długotrwałych zaparć należy skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń.
- Mikrowlewka jest jednorazowego użytku, dlatego nie może być ponownie stosowana.

**Masa netto: 60g**

**Producent:**

Aboca S.p.A. Societa Agricola Loc. Aboca, 20-52037 Sansepolcro (AR) - Italia

**Dystrybutor:**

Aboca Polska Sp. z o.o., 40-484 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6 - Polska