

# Aboca Melilax Pediatric mikrowlewka doodbytnicza z Promelaxin, 6 sztuk po 5 g

Cena: 39,99 PLN



## Opis słownikowy

Producent /  
Marka Aboca

Substancja  
czynna -

Typ produktu Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Aboca Melilax Pediatric mikrowlewka doodbytnicza z Promelaxin, 6 sztuk po 5 g

Mikrowlewka doodbytnicza z Promelaxin. 6 jednorazowych mikrowlewek z obudową kaniuli po 5 g

## Wskazania:

- **Melilax Pediatric** przeznaczony jest do leczenia zaparć u dzieci i u niemowląt, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w przypadku jelita nadwrażliwego), szczeliny odbytu i hemoroidów.
- Produkt oczyszcza jelito i wykazuje działanie ochronne, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości, podrażnienia i stan zapalny obecne w czasie zaparcia.

## Działanie:

**Melilax Pediatric** łączy działanie wypróżniające z działaniem ochronnym i w konsekwencji łagodzącym błonę śluzową odbytu.

Podwójne działanie **Melilax** uzyskiwane jest dzięki **PROMELAXIN**, kompleksowi miodów nektarowych i spadziowych, odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych na podstawie zawartości monosacharydów, polisacharydów i melanoidyn, wzbogaconemu o frakcję polisacharydową z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego.

**Melilax Pediatric** ma działanie wypróżniające, które zapewnia bodziec aktywujący defekację.

Ponadto **Melilax Pediatric**, dzięki właściwościom przypominającym śluz oraz lepkości, chroni błonę śluzową odbytu podczas przechodzenia stolca.

Te szczególne właściwości, w połączeniu z działaniem przeciwutleniającym, nadają produktowi zdolność do ochrony, co prowadzi do łagodzenia błony śluzowej.

## Skład:

### Substancje czynne 73,2%

Promelaxin, kompleks miodów i polisacharydów z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego. Mianowany na: monosacharydy ? 50%, polisacharydy (ciężar molekularny > 20 000 Dalton) ? 0,3%.

Zawiera ponadto: mieszankę wodno-glicerynową, sok z cytryny, olejek eteryczny z lawendy.

## Sposób użycia:

- Otworzyć mikrowlewkę, usuwając obudowę kaniuli:
- Chwycić za biały pierścień umieszczony na pojemniku harmonijkowym. Drugą dłonią zginać obudowę kaniuli do momentu jej złamania i całkowitego oderwania od pierścienia;
- Wysunąć obudowę kaniuli.
- Nałożyć kilka kropel produktu wokół odbytu i wprowadzić delikatnie kaniulę do odbytu.
- Wcisnąć do końca mikrowlewkę i następnie trzymać ją wciśniętą do momentu całkowitego wyciągnięcia kaniuli, aby uniknąć zasysania produktu.

## Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. W przypadku długotrwałych zaparć należy skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- Chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0373

- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
- Mikrowlewka jest jednorazowego użytku, dlatego nie może być ponownie stosowana, gdy zużyje się tylko połowę dawki, jak w przypadku niemowląt.

## Producent:

Aboca S.p.A. Societa Agricola - Loc. Aboca, 20 52037 Sansepolcro (AR) - Italia

## Dystrybutor:

Aboca Polska Sp. z o.o., 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6 - Polska.