

Accu-Chek Active, testy paskowe, do oznaczenia stężenia glukozy we krwi, 50 sztuk



Cena: 39,36 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Roche Diagnostic
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Accu-Chek Active, paski testowe do oznaczenia stężenia glukozy we krwi, do glukometru, 50 sztuk

Paski testowe przeznaczone do samodzielnego pomiaru glukozy we krwi przy użyciu aparatów Accu-Chek Active.

Sposób użycia:

Nanoszenie krwi na pasek testowy:

- **opcja: test paskowy w glukometrze:** włóż pasek do glukometru. Przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.
- **opcja: test paskowy poza glukometrem** - przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego. Wsuń test paskowy w kierunku pokazanym przez strzałki do prowadnicy. Test musi wyczuwalnie

"zaskoczyć" na swoje miejsce. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.

Testy paskowe są bardzo czułe na występującą w powietrzu wilgoć. Nie wyjmuj testów mokrymi rękami i zamykaj pojemnik testów paskowych oryginalną pokrywką natychmiast po wyjęciu z niego testu. Pokrywka pojemnika z testami zawiera substancje osuszającą, chroniącą testy przed wilgocią. Jeśli wilgoć wniknie do pojemnika, np. przez wilgotne ręce, albo pojemnik pozostanie otwarty przez dłuższy czas, substancja osuszająca straci swoje właściwości. Korzystanie z nieużytecznych testów paskowych może prowadzić do powstawania błędnych wyników.

Nieprzestrzeganie poniższych punktów może prowadzić do powstania błędnych pomiarów:

- używaj wyłącznie testów paskowych, których data ważności jeszcze nie upłynęła,
- nie wyjmuj testu z pojemnika mokrymi rękami,
- dokładnie i szczerze zamykaj pojemnik zbiorczy testów,
- nie zginaj testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru,
- nie zginaj i nie poruszaj testem paskowym przed lub podczas nanoszenia na niego krwi i podczas trwania pomiaru.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny do jednorazowego użytku. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent:

Roche Diabetes Care GmbH, Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, Niemcy.

Dystrybutor:

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; ul. Domaniewska 28; 02-672 Warszawa.