

Accu-Chek Instant, testy paskowe, do oznaczania glukozy we krwi, 100 sztuk



Cena: 73,95 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Roche Diabetes
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Accu-Chek Instant, paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi, do glukometru, 100 sztuk

Accu-Chek® Instant paski testowe do glukometru to wyrób medyczny przeznaczony do monitorowania poziomu glikemii.

Produkt jest odpowiedni do użycia w następujących urządzeniach:

- glukometr Accu-Chek® Instant,
- glukometr Accu-Chek® Instant S.

Zastosowanie:

- Do oznaczania stężenie glukozy we krwi.

Do przeprowadzenia pomiaru poziomu glukozy przy użyciu pasków testowych Accu-Chek® Instant wystarczy 1 kropla krwi (około 0,6 mikrolitra). Należy nanieść ją na dowolne miejsce wzdłuż żółtej krawędzi testu. Nie należy aplikować krwi na górną część testu paskowego. Wynik badania otrzymywany jest już po upływie 4 sekund.

Wzdłuż testów paskowych naniesiono barierę ochronną. Dzięki temu można dotykać go na całej powierzchni.

Sposób użycia:

1. Wyjmij pasek testowy z opakowania.
 2. Wsuń pasek do glukometru – urządzenie włączy się automatycznie.
 3. Przystaw kroplę krwi (0,6 mikrolitra) do testu paskowego stroną z żółtym okienkiem.
 4. Wynik pojawi się na ekranie po kilku sekundach
- Z glukometrem Accu-Check Instant możesz używać wyłącznie pasków testowych Accu-Check Instant.
 - Po wyciągnięciu testu do pomiaru zamykaj fiolkę z testami paskowymi. Ciepło, wilgotność i inne warunki mogą mieć wpływ na testy paskowe.

Specyfikacja:

- **Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość):** 10 mg/dL (0,6 mmol/L) dla testu paskowego.
- **Zakres pomiarowy systemu:** 10-600 mg/dL (0,6 -33.3 mmol/L).
- **Wielkość próbki:** 0,6 μ l.
- **Czas trwania pomiaru:**