

Accu-Chek Performa, Paski do oznaczania glukozy we krwi, 50 sztuk



Cena: 39,26 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Roche Diabetes
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Accu-Chek Performa, paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi, do glukometru, 50 sztuk

Accu-Chek® Performa paski testowe do glukometru to wyrób medyczny przeznaczony do monitorowania poziomu glikemii.

Produkt jest odpowiedni do użycia w następujących urządzeniach:

- Accu-Chek® Performa
- Accu-Chek® Performa Nano
- Accu-Chek® Performa Combo
- Accu-Chek® Performa Insight
- Accu-Chek® Performa Solo

Zastosowanie:

- Do oznaczania stężenie glukozy we krwi.

Sposób użycia:

Nanoszenie krwi na pasek testowy: przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego.

Testy paskowe są bardzo czułe na występującą w powietrzu wilgoć. Nie wyjmuj testów mokrymi rękami i zamykaj pojemnik testów paskowych oryginalną pokrywką natychmiast po wyjęciu z niego testu. Pokrywka pojemnika z testami zawiera substancje osuszającą, chroniącą testy przed wilgocią. Jeśli wilgoć wniknie do pojemnika, np. przez wilgotne ręce, albo pojemnik pozostanie otwarty przez dłuższy czas, substancja osuszająca straci swoje właściwości. Korzystanie z nieużytecznych testów paskowych może prowadzić do powstawanie błędnych wyników.

Nieprzestrzeganie poniższych punktów może prowadzić do powstania błędnych pomiarów:

- używaj wyłącznie testów paskowych, których data ważności jeszcze nie upłynęła;
- nie wyjmuj testu z pojemnika mokrymi rękami;
- dokładnie i szczerze zamykaj pojemnik zbiorczy testów;
- nie zginaj testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru;
- nie zginaj i nie poruszaj testem paskowym przed lub podczas nanoszenia na niego krwi i podczas trwania pomiaru.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny do jednorazowego użytku. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci.
- Nie używać ponownie.

- Po użyciu wyrzucić do kosza.

Producent:

Roche Diabetes Care GmbH, Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, Niemcy.

Dystrybutor:

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; ul. Domaniewska 28; 02-672 Warszawa.