

Acticoat Flex 3, opatrunek antybakteryjny, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka



Cena: 19,23 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	SMITH NEPHEW
Substancja czynna	Emplastry antimicrobiotica
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Acticoat Flex 3, opatrunek, 10 cm x 10 cm - 1 sztuka (z opakowania zbiorczego)

Rozmiar: 10x10cm

Opis:

- Acticoat Flex 3 – antybakteryjny opatrunek na rany ze srebrem nanokrystalicznym. Opatrunek może szybko uwalniać duże ilości srebra, przez co stanowi barierę antybakteryjną skuteczną do 3 dni. Jego działanie bakteriobójcze jest skuteczne przeciwko drobnoustrojom, co zmniejsza ryzyko infekcji.
- Acticoat Flex 3 przyspiesza gojenie ran. Opatrunek jest elastyczny, dopasowuje się do ruchów pacjenta, co wpływa na komfort jego noszenia. Opatrunek nie przykleja się do rany, dzięki czemu urazy są zminimalizowane podczas zmiany opatrunku.

Działanie:

- Działanie wyrobu opiera się na właściwościach srebra nanokrystalicznego, które – w porównaniu do zwykłych cząsteczek srebra – ma silniejsze działanie. Srebro to wykazuje dużą aktywność w zwalczaniu mikroorganizmów, w tym bakterii Gram-ujemnych

i Gram-dodatnich, drożdży i patogenów grzybiczych. Srebro nanokrystaliczne tworzy barierę przeciwbakteryjną i chroni ranę przed dostaniem się patogenów do jej wnętrza.

Wskazania:

Opatrunki Acticoat Flex 3 są wskazane do stosowania na:

- rany powierzchniowe i głębokie,
- oparzenia,
- rany pooperacyjne,
- odleżyny,
- owrzodzenia żyłne i owrzodzenia cukrzycowe.

Charakterystyka produktu:

- Acticoat Flex 3 jest opatrunkiem o elastycznej, łatwo dostosowującej się do kształtu rany wyrobem. Dedykowany jest na rany powierzchniowe lub głębokie, nawet te zakażone. Opatrunek można ciąć. Jest prosty w użyciu. Wspiera utrzymanie wilgotnego środowiska w ranie, dzięki czemu skraca proces gojenia.

Stosowanie produktu:

- Produkt może być wykorzystywany w terapii podciśnieniowej (NPWT), opatrunek może być położony bezpośrednio na zakażonej ranie i przykryty opatrunkiem NPWT. Budowa opatrunku nie ma wpływu na rozkład stosowanego podciśnienia i umożliwia swobodny przepływ wysięku do systemu NPWT.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Szczególnie w przypadku nadwrażliwości na srebro.
- W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi i środki ostrożności:

- Produkt należy usunąć przed badaniami z zastosowaniem rezonansu magnetycznego oraz przed zastosowaniem radioterapii.
- Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
- W trakcie stosowania opatrunku może wystąpić przejściowy ból. Jeśli po aplikacji opatrunku ból nie ustąpi, opatrunek należy usunąć. Aby załagodzić występujący ból, należy założyć nowy opatrunek i użyć produktu hydrożelowego.

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.