

# Akustone spray, do uszu, higiena uszu, usuwanie korków woskowinowych, 15 ml



Cena: 19,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### AkusTone, spray do uszu, 15 ml

AkusTone to wyrób medyczny, którego składniki w łagodny sposób rozpuszczają woskowinę zalegającą w zewnętrznym przewodzie słuchowym umożliwiając zachowanie właściwej higieny oraz ułatwiając usuwanie korków woskowinowych i przeciwdziałając ich powstawaniu. Dzięki specjalnej końcówce możliwe jest łatwe rozpylenie produktu w przewodzie słuchowym bez wytwarzania nadmiernego ciśnienia.

## Skład:

- Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbát 80.
- Nie zawiera wody ani konserwantów.

## Właściwości produktu:

- rozpuszcza zalegającą woskowinę,

- przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych,
- umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowiny u dzieci lub osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki,
- przeciwdziała zaleganiu wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.

## Zastosowanie:

Ze względu na formę aplikacji, produkt jest równomiernie rozprowadzany w przewodzie słuchowym, dzięki czemu nie ma konieczności głębokiego wsuwania aplikatora do ucha.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

**Dzieci i niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia:** 1 rozpylenie,

**Dorośli:** 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego:

**Rozpuszczanie korków woskowinowych:**

- stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny.

**Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu:**

- stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych,
- stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zaleganiu wody w uchu.

U dzieci i niemowląt wyrób powinien być aplikowany z zachowaniem ostrożności przez osobę dorosłą.

Aplikatora nie wsuwać zbyt głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu. Po zastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego.

Przed pierwszym użyciem należy kilka razy energicznie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia wyrobu.

Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku chorób narządu słuchu, perforacji błony bębenkowej lub gdy w uchu znajduje się ciało obce.
- Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.
- W przypadku rozpuszczania korków woskowi nowych, jeżeli problemy ze słuchem lub inne dolegliwości nie ustąpią po 5 dniach stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.
- U niemowląt i małych dzieci poniżej 1. roku życia stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.
- Ze względów higienicznych zalecane jest stosowanie wyrobu przez jedną osobę.
- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją opakowania załączoną do opakowania.

- Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania wyrobu

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
- Należy zwrócić na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania.

## Producent:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice