

Akutol na oparzenia spray 50 ml



Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Akutol, spray na oparzenia, 50 ml

Wyrób medyczny Akutol spray na oparzenia jest hydrożelem zawierającym kwas hialuronowy i pomocnicze składniki roślinne przeznaczonym do stosowania na drobne oparzenia powierzchniowe I,II a stopnia także skóry po nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.

Wskazania:

- do stosowania na drobne oparzenia powierzchniowe I,II a stopnia
- I stopień charakteryzuje się zwykłym zaczerwienieniem oparzonego obszaru i nienaruszonym naskórkiem. Gojenie oparzeń trwa kilka dni i nie pozostawia śladów
- II stopień - miejsce oparzenia jest zaczerwienione i tworzą się pęcherze. Naskórek i skóra właściwa są uszkodzone jedynie powierzchniowo przy właściwym postępowaniu oparzenie zagoi się całkowicie nie pozostawiając śladów.

Działanie:

- tworzy na powierzchni rany elastyczny film ochronny, który przyspiesza proces regeneracji
- zapobiega wysychaniu, umożliwia oddychanie rany, ponadto nie przepuszcza wilgoci i mikroorganizmów z otoczenia
- wysoka zawartość wody, sól sodowa kwasu hialuronowego i substancje pomocnicze chłodzą i łagodzą oparzone miejsce i utrzymują optymalne nawilżenie co wspomaga szybką regenerację

Sposób użycia:

- oparzone miejsce oczyścić i schładzać pod bieżącą wodą o temperaturze 8-12 °C do zaniku ostrego bólu, zaleca się przez okres do 15 minut.
- w przypadku barku dostępu do wody, wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, w celu schłodzenia oparzonego miejsca, należy zastosować ponowne spryskanie sprayem AKUTOL Spray na oparzenia.
- na całą oparzoną powierzchnię, naciskając na rozpylacz, należy nanieść AKUTOL Spray na oparzenia w taki sposób, aby preparat nie ściekał nadmiernie z rany.
- idealna odległość wynosi 15-20 cm od oparzonej powierzchni skóry.
- nanoszenie spray należy powtarzać przynajmniej 3x dziennie, zawsze po umyciu się i po kąpieli, aby oparzone miejsce było stale pokryte ochronnym filmem i aby została zachowana zasada wilgotnego leczenia ran.
- w przypadku niezamierzonego kontaktu rozpylacza ze skórą (raną) należy rozpylacz przepłukać pod bieżącą wodą i po jego wyschnięciu zamknąć wieczkiem ochronnym.
- **preparat do stosowania u dorosłych, dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz dla diabetyków**
- stosować do momentu zagojenia się rany

Składniki:

Aqua, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Calendula Officinalis Flower Extract, Carbomer, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide

Ciąża i karmienie piersią:

- u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

- nie jest przeznaczony do stosowania na rozległe oparzenia II.b i III kiedy dochodzi do głębokiego uszkodzenia naskórka i skóry właściwej lub do utraty skóry na całej grubości.
- nie należy stosować w przypadku reakcji alergicznej
- nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia

Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu

- przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu
- nie przekłuwać ani nie spalać nawet po zużyciu
- nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- nie przechowywać lub pozostawiać na słońcu lub w pobliżu źródła ciepła
- nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C
- ogrzanie grozi wybuchem

Środki ostrożności:

- zużyć najpóźniej do daty podanej na spodzie pojemnika.
- nie wdychać aerozolu
- unikać kontaktu z oczami
- w przypadku nadmiernego zaczerwienienia skóry i pojawienia się pęcherzy po opalaniu, w razie wystąpienia reakcji zapalnej oparzonego miejsca oraz w przypadku wątpliwości lub kiedy pęcherze powiększają się, pomimo opatrzenia rany, należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 2265
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Objętość netto: 50 ml

Producent:

Aveflor a.s.Kopidlno Republika Czeska

Dystrybutor:

Salus International Katowice