

## Akutol, Opatrunek Ochronny w Sprayu, 60 ml



Cena: 21,95 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Salus International
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Akutol Opatrunek Ochronny z Tworzywa Sztucznego, 60 ml

#### Opis produktu:

Wyrób medyczny Akutol to antybakteryjny opatrunek w spray'u umożliwiający łatwe opatrzenie drobnych ran, otarć oraz ran ciętych.

#### Składniki:

Ethanolum denaturatum, Dimethyletherum, Copolymerum acrylatum, Dioxacyclopentanum.

#### Wskazania:

Spray wskazany jest do stosowania na niekrwawiące rany cięte, drobne rany i otarcia.

#### Działanie:

Produkt tworzy na ranie odporną na zmywanie warstwę ochronną, która zabezpiecza ranę przed działaniem czynników zewnętrznych, jednocześnie nie krępując ruchów.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

- Dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię rany.
- Wstrząśnij pojemnikiem i z odległości około 15 cm rozpyl cienką warstwę na ranę.
- W celu zmycia produktu użyj alkoholu.

## Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Nie stosować na rany krwawiące.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Skrajnie łatwopalny aerozol - pojemnik pod ciśnieniem, nie ogrzewać pojemnika, chronić przed źródłami ciepła, promieniami słonecznymi, iskrami lub innymi źródłami zapłonu.
- Nie wdychać substancji lotnych podczas aplikacji.
- Należy zachować ostrożność podczas stosowania w okolicach oczu i błon śluzowych.
- W razie wystąpienia podrażnienia skóry należy zaprzestać stosowania produktu.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł światła.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Produkt skrajnie łatwopalny. Ogrzanie grozi wybuchem.
- Chronić przed światłem słonecznym, źródłami ciepła, gorącymi powierzchniami, iskrami, ogniem i innymi źródłami zapłonu.
- Nie przekłuwać i nie spalać, nawet po zużyciu.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 2265
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.