

Akutol, spray, do bezbolesnego usuwania plastrów, 35 ml



Cena: 22,20 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Salus International
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Akutol, spray do bezbolesnego usuwania plastrów - 35 ml

Opis produktu:

- Wyrób medyczny Akutol to spray umożliwiający **bezbolesne zdejmowanie plastrów**.

Składniki:

- Hexamethyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.

Wskazania:

- Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci, odpowiedni również dla osób o bardzo suchej i popękanej skórze.
- Może być używany w celu usunięcia plastrów kryjących, transdermalnych, opatrunków przyklejonych oraz innych wyrobów

medycznych przyklejanych do ciała (np. plastry nikotynowe, hormonalne, elektrody EKG).

Działanie:

- **Spray Akutol** umożliwia łatwe i bezbolesne zdejmowanie plastrów i opatrunków przyklejonych.
- Produkt jest bezpieczny dla skóry i odparowuje w całości, dzięki czemu nie jest wchłaniany przez ranę, a także nie wpływa na procesy gojenia.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

1. Z odległości około 10-15 cm spryskaj plaster.
2. Odczekaj 10-15 sekund.
3. Zerwij plaster szybkim ruchem.
 - W przypadku plastrów wodoodpornych należy spryskać ich róg, po kilku sekundach podnieść krawędź i ponownie spryskać.
 - Zdejmować plaster partiami, aż do jego całkowitego usunięcia.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie należy wdychać ani podpalać sprayu.
- Chronić przed dostaniem się aerozolu do oczu i na błony śluzowe.
- W przypadku ran przewlekłych, w celu zachowania higieny produkt powinien być stosowany tylko przez jednego pacjenta.

Pojemnik pod ciśnieniem

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł światła. Chronić przed wilgocią.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Chronić przed promieniami słonecznymi, ciepłem, gorącymi powierzchniami, iskrami, otwartym płomieniem oraz innymi źródłami ognia

Ważne:

- wyrób medyczny - posiada certyfikat CE.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.