

# Akutol, Stop, spray, preparat tamujący drobne krwawienie z alginianami, 60 ml



Cena: 19,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Salus International
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Akutol Stop spray - 60 ml

#### Opis produktu:

Akutol Stop to wyrób medyczny tamujący krwawienie z alginianami.

- tamuje drobne krwawienie
- uspokaja miejsca ran

#### Składniki:

Methylal, Butane Algin, Propane, Calcium Alginate, Stearalkonium hectorite, Alcohol denat., Isobutane, PPG-2 methyl ether, Simmondsia chinensis seed oil, Hippophae rhamnoides fruit extract, Aloe ferox leaf extract, Calendula officinalis leaf extract, Chamomilla recutita flower extract, L-Menthol

## Wskazania:

drobne rany powierzchniowe

## Działanie:

Akutol stop używa się do tamowania krwawienia i opatrywania drobnych ran powierzchniowych. Aktywny składnik alginianów tworzy nad raną warstwę z proszku, która adsorbuje krew z miejsca rany, przy czym powstaje chłodzący hydrożel, który także uspokaja miejsce rany.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
- Pojemnik trzymać pionowo dnem do dołu.
- Preparat nanosić poprzez rozpylenie na dezynfekowane miejsce z odległości 15-20 cm od powierzchni ciała.
- Preparat stosować w ilości odpowiadającej wielkości rany tak, aby nie spływał z opatrywanego miejsca.
- Rozpylając przez 2 sekundy nanieść około 1 g preparatu, co wystarcza na opatrzenie około 5 cm rany.
- W razie konieczności można zabieg powtórzyć po wcześniejszym delikatnym oczyszczeniu zranionego miejsca.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Skrajnie łatwopalny aerozol - pojemnik pod ciśnieniem, nie ogrzewać pojemnika, chronić przed źródłami ciepła, promieniami słonecznymi, iskrami lub innymi źródłami zapłonu.
- Nie wdychać aerozolu oraz chronić oczy.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł światła. Chronić przed wilgocią.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Ważne:

- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 2265.
- Posiada deklarację zgodności UE.

- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.