

Albivag gel Kadefarm, żel dopochwowy, 30 ml



Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Kadefarm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Albivag Kadefarm gel, żel dopochwowy - 30 ml

Opis produktu:

Albivag Kadefarm gel żel dopochwowy to wyrób medyczny, który posiada unikalną formułę na bazie kwasu hialuronowego, izoflawonów sojowych, malwy, aloesu, nagietka lekarskiego oraz olejku z drzewa herbacianego.

Skład:

Kwas hialuronowy, ekstrakt sojowy (miareczkowany w 40% roztworze izoflawonów i 25% roztworze genisteiny), glikolowy ekstrakt z malwy, kwas borny, destylowana woda nagietkowa, olejek eteryczny z drzewa herbacianego (tea tree), aloes zwyczajny (aloe vera), ksylitol, karbomer, hydroksyetyloceluloza, trietanolamina, disodium EDTA, uwodniony olej rycynowy PEG-40, dehydrooctan sodu, mocznik imidazolidynyowy, substancja zapachowa, woda.

Wskazania:

- Wspomagająco w leczeniu różnych dolegliwości wywołanych atrofią nabłonka błony śluzowej pochwy i sromu lub związanych z suchością pochwy, u kobiet w wieku rozrodczym lub w okresie menopauzy.

Działanie:

- Zawartość kwasu bornego pozwala utrzymać fizjologicznego, kwaśnego, odczynu środowiska pochwy, wzmacniając naturalne działanie ochronne jej flory bakteryjnej i tym samym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka nawracających infekcji.

- Unikalna formuła na bazie kwasu hialuronowego, izoflawonów sojowych, malwy, aloesu, nagietka lekarskiego oraz oleju z drzewa herbacianego pielęgnuje i przywraca naturalną elastyczność, a także miękkość i integralność nabłonka błony śluzowej pochwy.

Dawkowanie:

- Żel dopochwowy Albivag gel należy stosować raz dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Za każdym razem należy używać nowego aplikatora.
- Należy dokładnie umyć ręce.
- Przebij otwór tubki nakrętką, a następnie umieść jednorazowy aplikator w szyjce tubki.
- Ostrożnie wycisnąć żel z tubki, aby napęlić aplikator do momentu zatrzymania się tłoka.
- Odkręcić aplikator z tubki i delikatnie włożyć do go pochwy.
- Przesunąć tłok aby wycisnąć żel.
- Zakręcić ostrożnie tubkę, a zużyty jednorazowy aplikator wyrzucić do kosza na śmieci.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu
- Produkt nie może być stosowany w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu
- Chronić od światła i wilgoci
- Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Kadefarm Sp. z o.o., ul. Gipsowa 18, Tarnowo Podgórne.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.