

# Amniocheck Test wykrywający wyciek wód płodowych, 5 szt



Cena: 93,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmabol
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny do samokontroli

### Amino Check Test do samokontroli wykrywający wyciek wód płodowych - 5 sztuk

#### Czym jest płyn owodniowy (wody płodowe)?

Płyn owodniowy to podobna do wody substancja otaczająca płód w macicy. Płód rośnie w worku owodniowym wypełnionym płynem owodniowym podczas ciąży. Worek owodniowy tworzy się około 12 dni po zjściu w ciążę. Kiedy twoje wody odejdą (oznaka porodu), twój worek owodniowy pęknie i płyn owodniowy wycieknie z twojej pochwy.

#### Nietrzymanie moczu w ciąży czy wyciek wód płodowych?

Sporo przyszłych mam ma rozterki przy ocenie wycieku płynu na bieliznie czy wkładce podczas ciąży. Zastanawia się, czy musi się już udać do szpitala z powodu zbliżającego się porodu. W tym celu szwajcarska firma PrimaLab po latach badań wprowadziła wkładki pomagające dać komfort sprawdzenia wycieku pod kątem wód płodowych w domu.

Na pewno ważnym aspektem sączenia wód płodowych będzie, w którym tygodniu ciąży jest pacjentka. Za przedwczesne odejście wód płodowych uznaje się, jeśli odejdą przed 38 tygodniem ciąży.

W każdym przypadku zawsze ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub położną.

## Dla kogo jest przeznaczony Amniocheck ?

Wyrób Amniocheck zalecany jest dla kobiet ciężarnych znajdujących się w **grupie wysokiego ryzyka, jak i spoza tej grupy**. Wyciekające wody płodowe zwiększają ryzyko infekcji zarówno dla matki jak i płodu, dlatego wczesne wykrycie może:

- zapobiec powikłaniom lub przedwczesnemu porodowi
- pomóc w zidentyfikowaniu możliwego przerwania błon płodowych, zwłaszcza po amniopunkcji
- pomóc w potwierdzeniu odejścia wód płodowych, aby pacjentka mogła dotrzeć do szpitala na czas w celu bezpiecznego przeprowadzenia akcji porodowej

## Jak działa?

Wyrób medyczny Amniocheck zawiera **5 wkładek**, które pod wpływem **zmiany pH** (podwyższone pH charakteryzuje się przy wycieku wód płodowych w odróżnieniu od moczu) **zmieniają barwę na niebieski lub zielony (o dowolnym natężeniu)**.

Zmiana z koloru żółtego na niebieski lub zielony w którejkolwiek części wkładki świadczy o **możliwym wycieku wód płodowych** - należy to niezwłocznie skonsultować z lekarzem. Pasek pełniący funkcję wskaźnika we wkładce może zmienić barwę na niebieską też w przypadku infekcji pochwy - z tego powodu przy zmianie barwy wkładki jest ważny kontakt z lekarzem.

## Jak używać wkładek Amniocheck?

Wkładka po wyjęciu z opakowania ma wskaźnik w kolorze jasnożółtym. Powinna być umieszczona w bieliźnie (może być noszona jak zwykła wkładka do 12 godzin) bezpośrednio przy pochwie pacjentki. Gdy pacjentka poczuje wyciek płynu należy zdjąć wkładkę i odczekać 15 minut. Po tym czasie sprawdź, czy kolor wkładki uległ zmianie.

## Zawartość opakowania:

Wkładki są pakowane pojedynczo w saszetkach. W opakowaniu znajduje się 5 wkładek.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE 0483
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Prima Lab SA, Via Antonio Monti 7, CH-6828 Balerna, Szwajcaria.

## Importer:

Farmabol Sp. z o.o., ul. T. Ociepki 4, 34-600 Limanowa.

