

Apteo stopery przeciwhałasowe 1 para



Cena: 2,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Apteo, Stopery, wkładki przeciwhałasowe, jednorazowe, 1 para

Stopery przeciwhałasowe MAT WP-F

Sposób użycia:

- dobrać odpowiednią ilość masy.
- uformować stożek z uchwytem lub kulkę.
- rozgrzać w dłoniach i włożyć do ucha.
- uszczelnić, dociskając palcem, aby wyjąć wkładkę, ucisnąć dół małżowiny.

Środki ostrożności:

- niestosowanie się do powyższych zaleceń może zmniejszyć skuteczność ochrony przeciwhałasowej.
- pewne substancje chemiczne mogą działać szkodliwie na wkładki.
- informacji udziela producent.

Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE 1437
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

Zawartość netto: 1 para

Producent:

EMSON-MAT ul. Za Górą 5 32-050 Skawina

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa