


APTEO Termofofor z pestek wiśni niebieski @

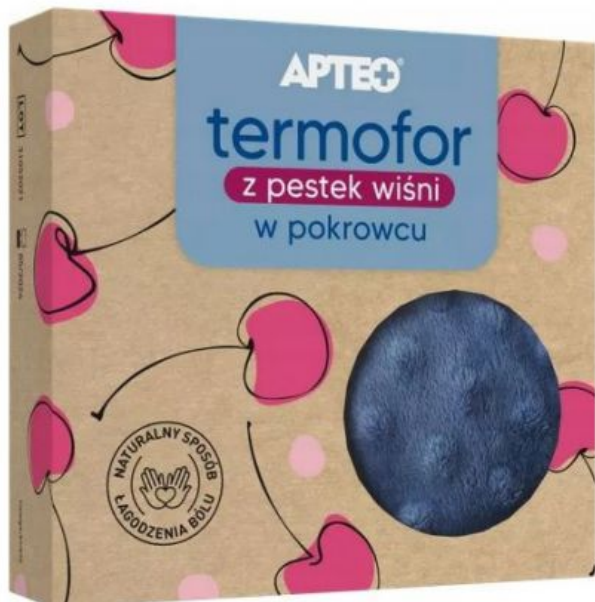

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Synoptis

Typ produktu

Opis produktu

Wyrób medyczny

Termofofor z pestek wiśni w pokrowcu

KOLOR NIEBIESKI

Opis produktu:

Termofofor z pestek wiśni w pokrowcu, termofofor z pestek wiśni wykonany jest z naturalnego surowca, pestek wiśni z polskich upraw umieszczonych w pokrowcu wewnętrznym ze 100-procentowej bawełny

Pokrowiec zewnętrzny wykonany jest z tkaniny Minky (poliester)

Skład:

- wkład materiałowy 100% bawełna + wypełnienie pestki wiśni 180g
- miękki i przyjemny w dotyku pokrowiec zewnętrzny 100% poliester

Wskazania:

Stosowany na zimno:

- przynosi ulgę w przypadku zwichnięć, guzów, bólów głowy, migren, ukąszeń insektów, lekkich poparzeń

Stosowany na ciepło:

- przynosi ulgę w przypadku kolek pokarmowych u niemowląt
- dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśniowymi i stawów, poprawia krążenie krwi i działa relaksacyjnie
- może być stosowany przez matki karmiące do rozgrzewania piersi

Sposób użycia:

- Podgrzewać w mikrofalówce o mocy 300 - 600W przez maks. 1 min
- Podgrzewać bez pokrowca zewnętrznego

Jako zimny okład:

- umieścić termoform w zamrażarce na ok. 30-60 minut

Jako ciepły okład:

- umieścić termoform w mikrofalówce o mocy 300-600 W na maks. 1 minutę
- umieścić termoform w piekarniku rozgrzanym do 120 stopni na ok.4 minuty
- umieścić termoform na grzejniku (kaloryferze), aż będzie wystarczająco podgrzany i ciepły

Gotowy do użycia wyrób włożyć w pokrowiec zewnętrzny i przyłożyć do miejsca ciała wymagającego oziębienia lub rozgrzania.

Wyrób będzie utrzymywał temperaturę do 30 minut w zależności od wielkości termoformy i temperatury otoczenia.

Czyszczenie:

- w przypadku zabrudzenia pokrowiec należy prać ręcznie

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- unikać silnego nacisku np. siadania na wyrobie - grozi to rozerwaniem pokrowca
- nie przegrzewać wyrobu powyżej zalecanych warunków ponieważ grozi to oparzeniem
- nie używać uszkodzonego termoformy
- **termoform należy schładzać i rozgrzewać bez pokrowca zewnętrznego, gdyż może spowodować to jego zniszczenie!**
- nie przegrzewać wyrobu powyżej zalecanych warunków, ponieważ grozi to zapłonem pestek

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.
- **Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu.**

Producent:

Top-Sale Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa