

APTEO, Termofor z pokrowcem, 2L



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Synoptis pharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

APTEO, Termofor z pokrowcem, 2L

KOLOR SZARY

Opis produktu:

Termofor z pokrowcem stosuje się w celach profilaktyczno-leczniczych, do miejscowego ogrzewania ciała.

Pokrowiec zewnętrzny wykonany z **miłych w dotyku** materiałów. Posiada **niedrażniący zapach**.

Wskazania:

Stosowany na zimno:

- przynosi ulgę w przypadku zwichnięć, guzów, bólów głowy, migren, ukąszeń insektów, lekkich poparzeń

Stosowany na ciepło:

- przynosi ulgę w przypadku kolek pokarmowych u niemowląt
- dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśniowymi i stawów, poprawia krążenie krwi i działa relaksacyjnie
- może być stosowany przez matki karmiące do rozgrzewania piersi

Sposób użycia:

- Około 3/4 objętości termoforu powinno być wypełnione wodą.
- Przytrzymując otwór wlewowy, powoli napełnij termofor w pozycji pionowej, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody. Aby uniknąć wydostawaniu się wody, przykryj termofor korkiem.
- Termofor osiągnie maksymalną temperaturę w ciągu około 5-10 minut.
- Po zakończeniu stosowania termoforu należy pozostawić otwarty z wlewem do dołu, aż całkowicie wyschnie po wylaniu wody poprzez odkręcenie korka.

Czyszczenie:

- W przypadku zabrudzenia pokrowiec należy prać ręcznie wodą z mydłem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed użyciem należy sprawdzić szczelność.
- Napełnienie termofora wrzącą wodą może spowodować jego uszkodzenie, dlatego należy tego unikać.
- Termofor napełniony gorącą wodą może spowodować oparzenia.
- Termoforu nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej.
- Niemowlęta i osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych nie powinny korzystać z tego produktu.
- Używać u dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby zapobiec pękaniu, nie należy wywierać nadmiernego nacisku (np. siadając na produkcie).
- Podczas użytkowania należy sprawdzać powierzchnię termoforu.
- Obszar ciała, który będzie miał kontakt z termoforem, nie powinien być smarowany maściami zawierającymi oleje lub inne substancje szkodliwe dla gumy.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.
- **Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu.**

Producent:

Ningbo Albert Novosino Co.,Ltd. No.1 Xinheng 3 Road, Cicheng Town Jiangbei District, 315036 Ningbo, Zhejiang, Chiny

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa