

Apteo żel na blizny 15 g



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Apteo, żel na blizny, 15 g

Wyrób medyczny przeznaczony do leczenia wszystkich rodzajów blizn

Wskazania:

- leczenie blizn pooperacyjnych (w tym po zabiegach mastektomii i cesarskiego cięcia)
- pourazowych
- poparzeniowych
- po trądzikowych
- przerostowych i keloidów
- po usunięciu tatuażu
- po terapiach laserowych oraz rozstępów

Działanie:

- zawarte w nim silikony tworzą przezroczystą ochronną powłokę, która zapewnia właściwe nawodnienie warstwy rogowej naskórka oraz uelastycznia strukturę blizny.

- wpływają one także na zmniejszenie wielkości blizny oraz jej odbarwienia.
- silikonowy niwelują negatywne odczucia napięcia tkanek oraz świądu wokół blizny, przynosząc ulgę.
- odpowiednio wczesna pielęgnacja blizn przeciwdziała powstawaniu bliznowców (keloidów) oraz blizn przerostowych

Sposób użycia:

- wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.
- należy stosować zgodnie z instrukcją użycia.
- w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- najlepiej stosować na świeże blizny.
- stosować na nieuszkodzoną skórę.
- należy dokładnie umyć i osuszyć bliznę.
- stosować od 2 do 4 razy dziennie.
- niewielką ilość żelu wmasować w bliznę delikatnymi, kolistymi ruchami przez około 3 minuty.
- pozostawić do wyschnięcia.
- nadmiar żelu usunąć, aby uniknąć zabrudzenia ubrania.
- na nałożoną warstwę żelu można stosować kosmetyki.
- stosowanie wyrobu medycznego Żel na blizny APTEO CARE należy rozpocząć jak najwcześniej po zagojeniu się rany i stosować regularnie przez co najmniej 2 miesiące.
- podczas stosowania żelu na blizny APTEO CARE należy unikać oddziaływania na bliznę promieni słonecznych, wysokich lub niskich temperatur.
- należy również chronić bliznę przed urazami i otarciami.
- niewskazane jest korzystanie z sauny i solarium

Skład:

- Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer.
- nie zawiera wody ani konserwantów

Środki ostrożności:

- nie stosować na błony śluzowe oczu, nosa i jamy ustnej.
- nie stosować na otwarte, niezagojone lub sączące się rany.

- nie stosować na nałożone wcześniej preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki.
- nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki wyrobu.
- nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- nie stosować wyrobu w razie uszkodzenia opakowania bezpośredniego – tuby

Ciąża i karmienie piersią:

- kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem wyrobu medycznego Żel na blizny APTEO CARE

Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C
- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

Zawartość netto: 15g

Producent:

Gofarm Sp. z o.o Sp. k. ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa