

## Aquacel Ag Extra, opatrunek 10x10cm, 1 sztuka



Cena: 32,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Convatec
Substancja czynna	Emplastry antimicrobiotyczna
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Aquacel Ag extra, opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających - 1 sztuka

Rozmiar: 10x10cm

### Opis produktu:

Aquacel Ag Extra to miękki, sterylny opatrunek zawierający dwie warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej impregnowanych 1,2% srebra jonowego, przesytych wzmocnionymi włóknami.

### Skład:

Dwie warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej impregnowane 1,2% srebrem jonowym, przesyte wzmocnionymi włóknami.

### Właściwości:

- pochłanianie dużych ilości płynu wysiękowego
- kontrola antybakteryjna

## Zastosowanie:

- rany zainfekowane lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji
- oparzenia pośredniej grubości (drugiego stopnia)
- owrzodzenia w przebiegu stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni, żyłne, tętnicze i o mieszanej etiologii oraz odleżyny (pośredniej i pełnej grubości)
- rany chirurgiczne
- rany pourazowe
- rany narażone na krwawienie, np. na skutek mechanicznego lub chirurgicznego oczyszczenia
- rany onkologiczne z wysiękiem, np. skórne guzy grzybiaste, rak powikłany grzybicą, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyńnowy

## Sposób aplikacji:

Przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić obszar rany za pomocą odpowiedniego środka oczyszczającego.

Rozmiar opatrunku należy dobrać tak, aby zakrył ranę i otaczającą ją skórę.

### Stosowanie:

- na rany z niewielkim lub średnim wysiękiem - stosować w połączeniu z opatrunkami nieprzepuszczającymi wilgoci
- na rany ze znacznym wysiękiem - stosować w połączeniu z nieprzylepnymi opatrunkami zewnętrznymi
- na suche rany - po umieszczeniu na ranie, zmoczyć obszar opatrunku znajdujący się na ranie solą fizjologiczną, następnie przykryć opatrunkiem nieprzepuszczającym wilgoci, który zapobiegnie wyschnięciu opatrunku

Opatrunek Aquacel Ag Extra może pozostać na ranie do siedmiu dni.

## Przeciwwskazania:

Opatrunek Aquacel Ag Extra nie należy stosować u osób wrażliwych bądź wykazujących reakcje alergiczne na srebro lub karboksymetylocelulozę sodową.

## Środki ostrożności:

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

- rany drążące, tunelowe lub głębokie
- jednoczesne stosowanie z produktami na bazie oliwy, np. wazeliną
- jeśli występują trudności przy zdejmowaniu opatrunku, należy całkowicie nasączyć opatrunek sterylnym roztworem soli fizjologicznej lub wodą

## Ważne:

- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

## Podmiot odpowiedzialny:

ConvaTec Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.