

Aquacel Extra, opatrunek 15cm x 15cm, 1 sztuka



Cena: 32,41 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Convatec
Substancja czynna	Emplastri microfibricum cellulosae
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Aquacel, extra, opatrunek hydrofiber z dodatkiem włókien wzmacniających - 1 sztuka

Rozmiar: 15x15cm

Opis produktu:

Aquacel Extra to miękki, sterylny, hydrowłóknisty opatrunek w postaci płytki na bazie karboksymetylocelulozy sodowej i zregenerowanych włókien celulozowych.

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

Skład:

- karboksymetyloceluloza sodowa
- zregenerowane włókna celulozowe

Właściwości:

- pochłanianie wysięku z rany
- tworzenie wilgotnego środowiska wspomagającego gojenie rany

Zastosowanie:

- owrzodzenia goleni
- odleżyny (stopnia II-IV)
- owrzodzenia w przebiegu ZSC
- rany chirurgiczne (np. pooperacyjne o przedłużonym gojeniu, miejsca pobrania skóry do przeszczepów)
- oparzenia II stopnia
- rany pourazowe (np. otarcia i rany szarpane)
- rany nowotworowe z wysiękiem (np. guzy skórne z powikłaniem grzybiczym, przerzuty skórne i mięsaki Kaposiego)

Sposób aplikacji:

- ten opatrunek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
- przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić obszar rany za pomocą odpowiedniego środka oczyszczającego
- rozmiar opatrunku należy dobrać tak, aby zakrył ranę i otaczającą ją skórę

Stosowanie:

- opatrunek Aquacel Extra może pozostać na ranie do siedmiu dni.
- opatrunek należy zmienić, gdy są wskazania kliniczne takie jak wyciek, nadmierne krwawienie lub większy ból.

W przypadku zastosowania opatrunku na oparzenia drugiego stopnia opatrunek należy zabezpieczyć sterylną chłonną gazą przymocowaną taśmą medyczną lub bandażem mocującym.

Opatrunek można pozostawić na ranie do 14 dni.

- na rany z niewielkim lub średnim wysiękiem - stosować w połączeniu z opatrunkami nieprzepuszczającymi wilgoci
- na rany ze znacznym wysiękiem - stosować w połączeniu z nieprzylepnymi opatrunkami zewnętrznymi
- na suche rany - po umieszczeniu na ranie, zmoczyć obszar opatrunku znajdujący się na ranie solą fizjologiczną, następnie przykryć opatrunkiem nieprzepuszczającym wilgoci, który zapobiegnie wyschnięciu opatrunku

Przeciwwskazania:

- Wrażliwość na opatrunek lub jego składniki

Środki ostrożności:

- leczenie owrzodzeń goleni, odleżyn, stopy cukrzycowej, oparzeń II stopnia, miejsc pobrania skóry do przeszczepu, ran pooperacyjnych i ran pourazowych powinno przebiegać tylko pod nadzorem specjalisty
- w zespole stopy cukrzycowej należy kontrolować stężenie glukozy we krwi

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku.

- brak informacji dotyczących stosowania opatrunku Aquacel Ag Extra u kobiet w ciąży.
- jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku.
- brak informacji dotyczących stosowania opatrunku Aquacel Ag Extra podczas karmienia piersią.

Ważne:

- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

Podmiot odpowiedzialny:

ConvaTec Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.