

Aquatiso, Woda morska izotoniczna, spray do nosa, 100ml



Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	JAGO-PRO SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Aquatiso woda morska Izotoniczna, Spray, do nosa, 100 ml

Aquatiso Woda Morska Izotoniczna stosuje się w przypadku uciążliwego uczucia suchości jamy nosowej, które może występować właściwie u każdego, niezależnie od wieku. Do głównych przyczyn dolegliwości zalicza się m.in.

- Częste przebarwienie w ogrzewanych i/lub klimatyzowanych pomieszczeniach,
- Używanie kropli donosa (zawierających substancję obkurczającą naczynia krwionośne jamy nosowej, np. ksylometazolinę),
- Infekcje górnych dróg oddechowych,
- Przeziębienie, alergię,
- Wdychanie zanieczyszczonego powietrza.

Wskazania:

Suchość błon śluzowych górnych dróg oddechowych nie jest poważną dolegliwością, ale może istotnie zmniejszyć komfort życia. Wysuszona śluzówka bardzo szybko staje się podrażniona, co może spowodować uczucie swędzenia, obrzęk, napady kichania, a nawet

krwawienie. Niewłaściwie nawilżona błona śluzowa nosa staje się bardzo podatna na działanie wirusów, bakterii i innych patogenów.

Aquatiso Woda Morska Izotoniczna silnie nawilża jamę nosową. Można ją stosować przy odczuwaniu suchości błony śluzowej nosa, spowodowanej różnymi czynnikami, jak również przy nieżycie i zapaleniu zatok powstałym w wyniku infekcji lub alergii. Wyrób łagodzi podrażnienia i przekrwienie błony śluzowej. Preparat ułatwia usunięcie wydzieliny, oczyszcza błonę śluzową, wspomaga naturalny proces oczyszczania jamy nosowej i zatok. Brak nagromadzonej wydzieliny zmniejsza ryzyko namnażania się drobnoustrojów.

Poprzez swoje działanie nawilżające i oczyszczające, zaleca się stosować go w przypadku:

Wyrób nie zawiera konserwantów ani substancji leczniczych. Aquatiso Woda Morska Izotoniczna ułatwia codzienną higienę nosa. Jest bezpieczny nawet przy długotrwałym stosowaniu. Regularne stosowanie wyrobu wpływa korzystnie na poprawę nawilżenia i oczyszczenia śluzówki nosa. Nawilżone i oczyszczone z kurzu, alergenów i wydzieliny błony śluzowe nosa i zatok, są mniej podatne na występowanie infekcji bakteryjnych i wirusowych. Stosowanie wyrobu przynosi ulgę oraz komfort oddychania w domu, jak i w podróży.

- Profilaktycznie i wspomagająco w terapii zapalenia błon śluzowych oraz infekcjach nosa i zatok.
- Wysuszenia śluzówki nosa,
- Zalegania wydzieliny i uczucia zatkanego nosa,
- Podrażnieniach i przekrwieniu błony śluzowej spowodowanych różnymi czynnikami

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość (alergia) na którykolwiek ze składników wyrobu.

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych, dzieci i niemowląt od 6. miesiąca życia.

- Niemowlęta od 6. miesiąca życia i dzieci do 6. Lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie, w zależności od potrzeby.
- Dzieci od 6. Roku życia i dorośli: 1 do 3 dawek do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Dawkowanie:

Aquatiso Woda Morska Izotoniczna należy stosować zgodnie z instrukcją używania.

Sposób stosowania:

1. Należy zdjąć nasadkę z aplikatora, a następnie delikatnie wsunąć jego końcówkę do otworu nosowego.
2. Nacisnąć aplikator około 1-2 sekundy.
3. Po każdym użyciu należy umyć aplikator mydłem i spłukać letnią wodą, osuszyć i nałożyć nakładkę.

Wyrób może być stosowany pod dowolnym kątem.

Skład:

Naturalna woda morska z Oceanu Atlantyckiego, woda demineralizowana.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Wyprodukowano dla: Medicinae Sp. z o.o., ul Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, Polska

Wytwórca: Jago PRO Sp. z o.o., ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno,