

## Argotiab, Hexanova 50ml



Cena: 41,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hexanova
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

**Argiotab, 50ml, środek wspomagający w leczeniu i regeneracji zmian skórnych, małych ran, oparzeń, odleżyn**

### Właściwości:

•

Środek wspomagający w leczeniu i regeneracji zmian skórnych, małych ran, oparzeń i odleżyn, maceracji skóry spowodowanej podrażnieniami przez nietrzymanie moczu u osób w podeszłym wieku lub wysypki pieluszkowej u dzieci, miejsc wprowadzenia cewnika naczyniowego (obwodowego i centralnego cewnika żylnego i tętniczego)

### Skład:

- Olej mineralny, glikol propylenowy, PEG 30, dipolihydroksystearynian, palmitynian izopropylu, PPG-15 eter stearylu, izononian izononatyłu, TIAB (kompleks jednowartościowych jonów srebra związanych kowalencyjnie z dwutlenkiem tytanu) chlorek benzalkoniowy, воск pszczeli bielony, octan tokoferylu, dimetikon, siarczan magnezu, woda.

## Sposób użycia:

- Przed użyciem oczyścić skórę, np. roztworem soli fizjologicznej i dobrze wysuszyć.
- Nałożyć cienką warstwę żelu na zmienione miejsce.
- Nie wmasowywać, pozostawić do samoistnego wyschnięcia.
- Czynność powtórzyć dwa razy dziennie.

## Środki ostrożności:

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Umyć ręce przed zastosowaniem produktu.
- Po zastosowaniu nie masować zmienionego miejsca i pozostawić wyrób medyczny do naturalnego wyschnięcia; żel musi utworzyć ochronną cienką błonę.
- Nie stosować produktu w innym wskazaniu niż podane w ulotce informacyjnej
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu niezwłocznie przemyć oczy wodą
- Nie stosować wyrobu medycznego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu
- Nie zamrażać
- Nie stosować w przypadku, gdy oryginalne opakowanie jest uszkodzone lub otwarte
- Po użyciu zamknąć tubkę
- Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na składniki
- Przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na składniki
- W przypadku długotrwałego stosowania skontaktować się z lekarzem

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Produkt przechowywać w temperaturze 15-25°C, w suchym miejscu.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0477
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Objętość netto: 350 ml

## Wytwórca:

NTC S.r.l. Via Luigi Razza, 3 20124 Mediolan, Włochy

## Dystrybutor:

Hexanova Sp. z o.o. Pieńków 11 05-152 Czosnów