

# Aspirator kataru KATAREK PLUS



Cena: 62,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Duna Sp. z o.o.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Wyrób medyczny

### Aspirator do odkurzacza KATAREK PLUS - 1 sztuka

#### Opis produktu:

Aspirator Katarek Plus to wyrób medyczny, dzięki któremu **skutecznie i szybko pozbędziesz się wydzieliny z noska malca, przynosząc mu natychmiastową ulgę**. Cały proces odciągania wydzieliny jest **całkowicie bezpieczny dla każdego dziecka**, już od pierwszego dnia życia. **Rozkręcana komora** aspiratora Katarek Plus ułatwia utrzymanie aspiratora w czystości, ergonomiczny kształt wpływa na zwiększenie komfortu podczas jego użytkowania, zaś długi wężyk gwarantuje swobodę ruchów.

Katerek Plus posiada dwie końcówki pozwalające na **stosowanie go u dwójki dzieci jednocześnie**. Zastosowany na końcówkach systemem identyfikacji „JA&TY” umożliwia ich rozróżnienie.

Produkt dedykowany nie tylko dla małych dzieci. Doskonale sprawdza się również u **osób niepełnosprawnych i niewspółpracujących**, gdzie wspomaga codzienną ich pielęgnację/ opiekę.

**Aspirator Katarek Plus** podłączany jest do domowego odkurzacza o mocy 800–1800 W. Zredukowana, jednostajna siła ssąca sprawia, iż jest on znacznie skuteczniejszy niż ustne aspiratory, które usuwają jedynie 1 wydzieliny, nie wspominając już o tradycyjnych gruszkach.

#### Zawartość opakowania:

- 1 x Aspirator z rozkręcaną komorą
- 2 x Końcówka z identyfikacją „JA&TY”
- 1 x Szczoteczka z wytrzymałym włosiem

## Sposób użycia:

1. Połącz komorę aspiratora w miejscu nacięcia i przekręć do oporu.
2. Do powstałej komory dołącz końcówkę.
3. Stożkowy koniec aspiratora włóż do rury ssącej włączonego odkurzacza (800–1800W).
4. Weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana. Końcówkę A przyłóż do otworu nosowego i odciągaj katar 5–10 sekund. Czynność powtórz na drugiej dziurce.
5. Wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniami.

## Odciąganie:

Odciąganie – ma na celu usunięcie rozrzedzonej wcześniej wydzieliny z nosa dziecka.

Odciąganie to moment kluczowy w oczyszczaniu nosa u dziecka.

- Właśnie ten etap odpowiada za prawidłowe i skuteczne udrożnienie dróg oddechowych.
- W celu przeprowadzania procesu efektywnie i w pełni bezpiecznie, należy użyć aspiratora marki Katarek, wchodzącego w zestaw do Metody 3 Kroków – Katarek Plus.
- Wykorzystując siłę ssącą odkurzacza, aspirator umożliwia jednostajne i szybkie usunięcie wydzieliny, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Zamocuj aspirator Katarek do rury od odkurzacza, ustal siłę ssania na najniższym poziomie, a następnie przykładając do jednej, a następnie drugiej dziurki noska dziecka odessij katar. Pamiętaj, żeby nie wkładać końcówki aspiratora do nosa dziecka, a po odessaniu umyj aspirator zgodnie z załączoną instrukcją.

## Bezpieczne rozwiązanie:

Mocny odkurzacz i delikatny organizm dziecka? To może wzbudzać pewne obawy. W przypadku KATARKA możesz mieć jednak pewność, że używając go wraz z odkurzaczem o mocy do 1800 W, taki zestaw nie zagrazi zdrowiu Twojego dziecka. Dzięki unikalnym kształtom poszczególnych elementów aspiratora, siła ssania zostaje odpowiednio zmniejszona. W efekcie wysoka skuteczność odciągania zostaje uzyskana w sposób bezpieczny dla maluszka.

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

**Dystrybutor:**

Duna Sp. z o.o.