

# Atrauman AG, opatrunek z maścią 10x20cm 1 sztuka



Cena: 29,69 PLN

## Opis słownikowy

Producent /  
Marka

Substancja  
czynna

Typ produktu

Emplastry antimicrobiotyczne

Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Atrauman Ag, opatrunek z maścią zawierający srebro - 1 sztuka

Rozmiar: 10x20cm

#### Opis produktu:

Atrauman Ag jest nieprzywierającym opatrunkiem barierowym zawierającym srebro, umożliwiającym atraumatyczne leczenie rany

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

#### Skład:

- hydrofobowa siatka poliamidowa z dodatkiem srebra metalicznego i maści z triglicerydów.
- produkt nie zawiera wazeliny i innych składników na bazie parafiny

## Właściwości:

- opatrunek nie przywiera do rany, dzięki czemu jego wymiana jest bezbolesna
- dobrze miękko układa się na ranie i ma dobry kontakt z jej podłożem
- zawarta w nim maść pielęgnuje brzegi rany i zapewnia ich elastyczność, natomiast po zdjęciu opatrunku nie pozostawia na ciele trudnych do usunięcia resztek
- antybakteryjne działanie opatrunku utrzymuje się do 7 dni
- produkt jałowy, jednorazowego użytku

## Zastosowanie:

- opatrunek **Atrauman Ag** wskazany jest do leczenia wspomagającego ran zainfekowanych (przewlekłych i ostrych) oraz jako dodatkowy środek zapobiegający infekcjom w trakcie terapii ran
- oparzenia do 2 stopnia, rany objęte krytyczną kolonizacją bakteryjną

## Sposób aplikacji:

Opatrunek jest typową warstwą kontaktową i powinien być przykryty wtórnym opatrunkiem chłonnym w zależności od rodzaju rany można zastosować dowolnie wybrany opatrunek wtórny

- Wyjmij opatrunek z opakowania
- Odklej papierową warstwę ochronną z jednej strony i przyłóż produkt do rany
- Usuń warstwę ochronną z drugiej strony
- W celu usuwania nadmiaru wydzieliny zastosuj dodatkowy, jałowy opatrunek chłonny
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej opatrunek można zmieniać przy każdej zmianie opatrunku wtórnego
- W przypadku występowania gęstej wydzieliny zaleca się nacięcie opatrunku **Atrauman Ag**, aby zapobiec jej zastojom

## Ważne:

- Produkt jednorazowy, nie stosować ponownie
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

## Podmiot odpowiedzialny:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

