


## Bejbi, Test ciążowy płytkowy, 1 sztuka

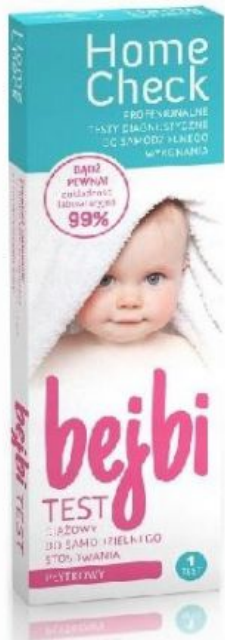

Cena: 3,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Home Check
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Home Check Bejbi test ciążowy płytkowy - 1 sztuka

### TEST DO SAMOKONTROLI

Test do samodzielnego wykonania w warunkach domowych.

- **Czułość analityczna** - 20 mIU/ml.
- **Dokładność** - ponad 99%
- **Czułość diagnostyczna** - 100%.
- **Swoistość diagnostyczna** - 100%.
- Czułość i swoistość testu została sprawdzona na 400 próbkach zgodnie z międzynarodową normą WHO3.

Test ciążowy Bejbi płytkowy monitoruje stężenie hormonu hCG w moczu w celu weryfikacji możliwej ciąży. **Idealny dla wszystkich**

kobiet, które planują ciążę.

### Czym jest hormon hCG?

We wczesnych stadiach ciąży zapłodnione jajo jest transportowane z jajowodów do macicy, gdzie po około siedmiu dniach zagnieżdża się w błonie śluzowej ściany macicy. Właśnie na tym etapie tkanka tworząca łożysko zaczyna wytwarzać ludzką gonadotropinę kosmówkową, zwaną także hormonem hCG, niezbędną do prawidłowego rozwoju ciąży. Szybkie pojawienie się i szybki wzrost stężenia hormonu hCG w moczu sprawiają, że jest to doskonały wskaźnik do wczesnego potwierdzenia ciąży.

### Jak działa test ciążowy?

Test ciążowy Bejbi płytkowy to urządzenie immunochromatograficzne, które **wykrywa hormon hCG w moczu poprzez specjalne sprzężone ze złotem przeciwciała monoklonalne zawarte w reaktywnym pasku.**

### Kiedy wykonać test?

Test można przeprowadzić po 6-ciu dniach od momentu zapłodnienia, chociaż wskazane jest wykonanie go dopiero dzień po terminie spodziewanej miesiączki, o dowolnej porze dnia, zaleca się użycie pierwszego moczu rano (eliminując pierwszy strumień) jako bardziej skoncentrowanego.

### Zawartość opakowania:

- Kopertka foliowa zawierająca 1 test oraz zakraplacz.
- Instrukcja użytkownika wyrobu.

## Sposób użycia:

1. W celu otrzymania wyniku należy pobrać próbkę moczu do pojemnika dołączonego do zestawu testowego.
2. Przy pomocy kroplomierza nabiera się kilka kropel moczu, a następnie umieszcza je na płytce umieszczonej na teście.
3. Wynik można odczytać już po pięciu minutach.
4. Nie należy odczytywać wyniku po upływie dziesięciu minut.
5. Po jednokrotnym użyciu zestaw należy wyrzucić do pojemnika na śmieci.

## Ważne:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

## Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 0197.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi oraz interfejs użytkownika w języku polskim.

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Producent: Milapharm sp. z o.o.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.