

Blizan, Silikonowy żel na blizny, roll-on, 15ml



Cena: 17,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aristo
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Blizan, hipoalergiczny żel silikonowy na blizny, roll -on - 15 ml

Opis produktu

Preparat do stosowania na blizny, w formie wygodnej rolki do aplikacji i masażu. Jest hipoalergiczny, przezroczysty i szybko wysycha po nałożeniu na skórę. **Przyczynia się do zmiękczenia, wygładzenia i poprawy elastyczności blizny, która stopniowo staje się mniej napięta i przebarwiona.** Stosowanie żelu Blizan to nowoczesna i skuteczna metoda **zapobiegania powstawaniu bliznowców i blizn przerostowych.**

- Dla dorosłych i dzieci, bez ograniczeń wiekowych,

Skład:

- Mieszanina polisiloksanów.

Wskazania:

- Żel Blizan można stosować na blizny u dorosłych i dzieci, bez względu na wiek: **zarówno blizny świeże, zaraz po zagojeniu rany, jak i stare.** Najkorzystniej jest, aby zastosować preparat w ciągu dwóch lat od powstania blizny. **Blizan** można stosować na blizny różnego pochodzenia:
- Keloidy i blizny przerostowe,

- Blizny pooperacyjne i pozabiegowe,
- Blizny pooparzeniowe i pourazowe,
- Rozstępy, np. po ciąży,
- **Blizny potrądzikowe.**

Działanie:

Żel **Blizan roll-on** to silikonowy preparat na blizny.

- Żel silikonowy tworzy na powierzchni skóry cienką, nieprzepuszczalną dla wody membranę, dzięki czemu utrzymuje właściwą wilgotność pokrytego miejsca.
- Wygodne opakowanie w formie aplikatora roll-on ułatwia miejscowy masaż blizny, zwiększający skuteczność działania.
- Zmiękcza, uelastycznia i wygładza bliznę, poprawia jej wygląd.
- Niweluje świąd i uczucie napięcia.

Stosowanie:

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

- Żel stosuje się zewnętrznie, na skórę, 2 razy dziennie.
- Przed zastosowaniem żelu należy umyć i osuszyć traktowane miejsce.
- Niewielką ilość żelu rozprowadzić na całą bliznę za pomocą aplikatora roll-on.
- Można przez około minutę prowadzić masaż zabliznionego miejsca, co dodatkowo wspomaga gojenie się blizn.
- Pozostawić do wyschnięcia. Ewentualny nadmiar preparatu można usunąć chusteczką.
- Niewyschnięty preparat może pobrudzić ubranie.
- Po wyschnięciu, na warstwę żelu można stosować kosmetyki.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego:

Żel **Blizan** rzadko powoduje działania niepożądane. Mogą wystąpić:

- Zaczerwienienia,
- Bolesność,
- Podrażnienie w miejscu aplikacji.

W przypadku wystąpienia tych lub innych niepokojących objawów, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować na zranioną skórę, rany i niecałkowicie zagojone rany.
- Nie stosować na błony śluzowe i okolice oczu.
- Nie stosować równocześnie z innymi preparatami i lekami nałożonymi w miejscu aplikacji.
- W przypadku objawów podrażnienia lub innych niepokojących zmian należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni Celcjusza
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł światła.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Ważne:

- Posiada certyfikat CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.