

Blizcare, plastry silikonowe na blizny, 7cmx3cm, 5 sztuk



Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------|
| Producent / Marka | Topsil Med |
| Substancja czynna | - |
| Typ produktu | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Wyrób medyczny

Blizcare Plastry Silikonowe na blizny 7 cm x 3 cm - 5 sztuk

ZADBAJ O SWOJĄ BLIZNĘ

Plaster przeznaczony do stosowania na każdy rodzaj blizn, po wygojeniu się rany.

- Wygładza, zmniejsza i uelastycznia bliznę, sprawiając, że staje się ona mniej widoczna.
- Plaster można stosować na blizny pooperacyjne, pooparzeniowe, pourazowe oraz blizny przerostowe i bliznowce.
- Plaster tworzy na powierzchni skóry cienką, elastyczną, oddychającą i nieprzepuszczalną dla wody membranę, utrzymując tym samym właściwą wilgotność skóry. Dzięki temu wspomaga leczenie i zmniejsza ryzyko powstawania blizn przerostowych i bliznowców.
- Ten hipoalergiczny, elastyczny, plaster jest wyrobem, który stanowi skuteczną, nowoczesną oraz nieinwazyjną metodę wspierania leczenia blizn.

Łagodzi następujące objawy związane z bliznami:

- Zmniejsza widoczność blizny.
- Uelastycznia skórę w miejscu blizny.
- Znosi uczucie napięcia i świądu.

- Przynosi ulgę w odczuwaniu dyskomfortu.

Opakowanie wystarcza na ok. miesiąc terapii.

Sposób użycia:

Stosować po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów. Przed użyciem dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. Jeżeli istnieje potrzeba precyzyjnego dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie.

Plaster powinien być zmieniany średnio co 5 do 7 dni.

Podczas zmian plastra należy zadbać o właściwą higienę skóry w miejscu jego stosowania.

Skład:

Elastyczny klej silikonowy pod postacią mieszaniny polidimetylosiloksanów umieszczonych na membranie poliuretanowej.

Uwagi:

- Plastry mogą być stosowane tylko zewnętrznie na zagojoną skórę. Nie stosować na zranioną skórę i otwarte rany.
- Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami i lekami nałożonymi w miejsce aplikacji.
- W przypadku objawów podrażnienia lub innych niepokojących zmian przerwać stosowanie.
- W przypadku stosowania u dzieci zabezpieczyć miejsce stosowania plastrów przed niekontrolowanym ściąganiem plastra przez dziecko.
- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Może wystąpić zaczerwienienie, bolesność lub podrażnienie w miejscu zastosowania.

Zawartość netto:

- Plastry Silikonowe na blizny 7 cm x 3 cm, 5 szt

Ważne:

- Wyrób medyczny w klasie IIa.
- Posiada certyfikat CE.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent: Topsil Med Sp. z o.o., ul. Graniczna 6, 96-321 Żabia Wola.