

Bliznasil, żel silikonowy do leczenia blizn, 15g



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Rada
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyroby medyczne

Bliznasil, żel silikonowy na blizny - 15 g

Opis produktu

Żel silikonowy BLIZNASIL jest przezroczystym, szybko wysychającym i bezzapachowym preparatem, stosowanym do leczenia blizn różnego pochodzenia, w tym po zabiegach chirurgicznych, oparzeniach, urazach oraz po trądziku.

Skład:

Polisiloksany, dwutlenek krzemu.

Przeznaczenie:

BLIZNASIL może być stosowany do leczenia następujących rodzajów blizn:

- Bliznowce (keloidy)
- Blizny przerostowe
- Blizny po operacjach chirurgicznych
- Blizny pourazowe
- Blizny pooparzeniowe

- Blizny potrądzikowe
- Blizny po cesarskim cięciu
- Blizny po operacjach plastycznych
- Blizny po terapiach laserowych
- Rozstępy

Działanie:

- Sprawia, że blizny stają się mniej widoczne
- Zmniejsza i uelastycznia blizny
- Przynosi ulgę, znosi uczucie napięcia i świądu
- Zmniejsza ryzyko powstania blizn przerostowych i bliznowców (keloidów) oraz łagodzi objawy z nimi związane
- Jest skuteczny przy stosowaniu na blizny stare oraz nowe, powstałe w wyniku gojenia ran pooperacyjnych, pourazowych i poparzeniowych

Stosowanie:

Leczoną bliznę należy umyć, a następnie wysuszyć. Dwa razy dziennie delikatnie wmasować niewielką ilość żelu BLIZNASIL. Pozostawić przez kilka minut do wyschnięcia. Jeżeli została zaaplikowana zbyt duża ilość żelu, to jego nadmiar należy usunąć chusteczką, aby nie poplamiać ubrania.

- Na prawidłowo nałożoną i wyschniętą warstwę żelu można stosować kosmetyki.
- Przebudowa blizny jest procesem powolnym, a im blizna jest starsza tym wolniej ten proces przebiega. Dlatego najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu żelu BLIZNASIL przez co najmniej dwa miesiące, nawet wtedy, gdy wydaje się, że problem już zniknął.
- BLIZNASIL można stosować na każdą bliznę bez względu na sposób i czas jej powstania.

Środki ostrożności:

- Podczas stosowania preparatu należy unikać niekorzystnych czynników takich jak: urazy i otarcia w okolicy blizny, ekspozycja blizny na promienie UV, niską i wysoką temperaturę.
- Tylko do użytku zewnętrznego
- Nie stosować na niezagojoną ranę
- Zaprzestać stosowania w przypadku podrażnienia.

Waga netto: 15 g

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE

- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**

Podmiot odpowiedzialny:

Noris Polska Sp. Z o. o. , Wołoska, Warszawa