

Bobo-test, Test ciążowy płytkowy, 1 sztuka



Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Bobo-test
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

WYRÓB MEDYCZNY

Bobo- test test ciążowy płytkowy - 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

SZYBKI I ŁATWY DO PRZEPROWADZENIA TEST CIĄŻOWY DO DOMOWEGO UŻYTKU

BOBO-TEST to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku. Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu. Test można stosować już po 10 dniach po stosunku. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu.

Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia

Przed przeprowadzeniem testu:

- Uważnie przeczytaj instrukcję użycia.
- Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test wyłącznie do diagnostyki in vitro (stosować tylko do użytku zewnętrznego).

- Jeżeli nie możesz wykonać testu tuż po pobraniu próbki moczu, możesz próbkę przechować przez 3 dni w temperaturze 2-8°C (np. w lodówce). Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać ok. pół godziny w temperaturze pokojowej.

Jak działa test?

Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon hCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu hCG co może stwierdzić ciążę lub jej brak. Bobo Test jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność hCG już przy stężeniu 25 mIU/ml.

Interpretacja wyniku:

- **Wynik ujemny (brak ciąży)** - Wynik jest negatywny, gdy pojawia się pasek kontrolny C, natomiast brak paska testowego T. Taki wynik w 99,9% oznacza, że najprawdopodobniej nie jesteś w ciąży.
- **Wynik dodatni (ciąża)** - Wynik jest pozytywny w momencie pojawienia się dwóch wyraźnych pasków na płytce testowej, a więc zarówno w strefie testowej T, jak i w strefie kontrolnej C. Intensywność barwy paska T lub C nie ma najmniejszego znaczenia. Taki wariant wynikowy wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że jesteś w ciąży. Aby potwierdzić ten stan, udaj się do lekarza specjalisty.
- **Wynik nieważny** - Wynik możesz uznać za nieważny, jeżeli nie pojawi się żaden pasek lub wyświetli się jedynie prążek strefy testowej T. Wówczas najlepiej jest powtórzyć badanie, używając nowego testu ciążowego zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania:

- Instrukcja użycia
- Jeden test płytkowy
- Pipetka

Ważne:

- W celu poprawnego przeprowadzenia badania koniecznie należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.
- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.
- Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do

samokontroli.

- Posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Podmiot odpowiedzialny:

Diagnosis S.A., Gen. W. Andersa 38A, Białystok.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym