

## Canpol babies, silikonowe osłonki piersi EasyStart M/L, 2 sztuki



Cena: 12,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Canpol Sp. z o.o.
Substancja czynna	-
Typ produktu	

### Opis produktu

## Canpol babies, silikonowe osłonki piersi EasyStart M/L, 2 sztuki

### Właściwości:

- Silikonowe osłonki piersi EasyStart chronią obolałe brodawki sutkowe na okres gojenia się podrażnień, zapewniając poczucie komfortu i umożliwiając dalsze karmienie piersią.
- Osłonki zostały wykonane z wysokiej jakości, miękkiego i delikatnego silikonu, który jest pozbawiony zapachu i smaku.
- Osłonki są odpowiednio wyprofilowane – górna krawędź osłonki jest nieco węższa, tak aby dziecko podczas karmienia piersią przytulało się bezpośrednio do piersi mamy czując jej ciepło i zapach skóry.
- Silikonowe osłonki piersi są dostępne w specjalnym etui idealnym do przechowywania, ale także do szybkiej dezynfekcji w kuchenke mikrofalowej, co ułatwia higienę i utrzymanie osłonek w czystości.
- W opakowaniu znajdują się 2 sztuki.
- Średnica otworu na brodawki (w najszerszym punkcie):

- rozmiar S: 15,10 mm

- rozmiar M/L: 18,60 mm

Zachowaj instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.

## Dodatkowe informacje:

### Instrukcja dezynfekcji osłonek w etui:

1. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj dokładnie etui w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz.
2. Wlej dokładnie 25 ml przegotowanej wody do podstawy. **WAŻNE!** Wlanie zbyt małej ilości wody może spowodować uszkodzenie etui. Wlanie zbyt dużej ilości wody może spowodować niewłaściwą dezynfekcję.
3. Włóż osłonki piersi do etui.
4. Szczelnie nałóż pokrywkę.
5. Zamknięte etui umieść w kuchence mikrofalowej.
6. Dla mikrofalówek o mocy 750-1000W czas dezynfekcji wynosi 2 minuty.

### Nie przekraczaj czasu dezynfekcji.

### UWAGA!

- Podczas dezynfekcji etui musi stać na równej powierzchni.
- Przed wyjęciem etui z mikrofalówki poczekaj co najmniej 5 minut, aby pojemnik ostygł.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i otwierania.
- Wylej pozostałą wodę z etui przez specjalny otwór, opłucz je i osusz. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania zdezynfekowanych przedmiotów, ponieważ mogą być gorące.
- Odczekaj 15 minut przed kolejną dezynfekcją, aby etui całkowicie ostygło.

## Sposób użycia:

- Produkt utrzymuj w czystości.
- Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj osłonki delikatnym płynem i dokładnie wypłucz.
- Dezynfekuj je we wrzącej wodzie przez około 3 minuty.
- Osłonki nie nadają się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalii.
- Można je dezynfekować w gorącej wodzie i sterylizatorze.
- Osłonkę nakładaj na suchą i czystą pierś.
- Nie stosuj żadnych kremów i wazelin.
- Nie dziurkuj ani nie powiększaj otworów osłonki, gdyż może to spowodować jej rozpad lub zniszczenie.

- Przed zastosowaniem produktu zalecamy konsultację z doradcą laktacyjnym lub położną.
- Przed założeniem osłonki delikatnie pomasuj brodawkę, aby ją wyciągnąć.
- Następnie przyłóż osłonkę do piersi tak, aby sutek wypełniał otwór i dokładnie dociśnij ją do piersi.
- Upewnij się, że część wyprofilowana skierowana jest ku górze lub miejscu gdzie podczas karmienia znajduje się nosek dziecka.
- Delikatnie przytrzymując osłonkę możesz rozpocząć karmienie.
- **Uwaga! Produkt nie jest zabawką.**
- Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.
- Czyste osłonki powinny być przechowywane w plastikowym pojemniku dołączonym do opakowania.
- Sprawdź je przed każdym użyciem.
- W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzuć.

## Producent:

Canpol Sp. z o. o., ul. Puławska 430, 02-884 Warszawa