

Canpol babies silikonowe osłonki piersi EasyStart S, 2 sztuki



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Canpol Sp. z o.o.

Substancja
czynna -

Typ produktu

Opis produktu

Canpol babies silikonowe osłonki piersi EasyStart S, 2 sztuki

Właściwości:

- Silikonowe osłonki piersi EasyStart chronią obolałe brodawki sutkowe na okres gojenia się podrażnień, zapewniając poczucie komfortu i umożliwiając dalsze karmienie piersią.
- Osłonki zostały wykonane z wysokiej jakości, miękkiego i delikatnego silikonu, który jest pozbawiony zapachu i smaku.
- Osłonki są odpowiednio wyprofilowane – górna krawędź osłonki jest nieco węższa, tak aby dziecko podczas karmienia piersią przytulało się bezpośrednio do piersi mamy czując jej ciepło i zapach skóry.
- Silikonowe osłonki piersi są dostępne w specjalnym etui idealnym do przechowywania, ale także do szybkiej dezynfekcji w kuchenke mikrofalowej, co ułatwia higienę i utrzymanie osłonek w czystości.
- W opakowaniu znajdują się 2 sztuki.
- Średnica otworu na brodawki (w najszerszym punkcie):

- rozmiar S: 15,10 mm

- rozmiar M/L: 18,60 mm

Zachowaj instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.

Dodatkowe informacje:

Instrukcja dezynfekcji osłonek w etui:

1. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj dokładnie etui w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz.
2. Wlej dokładnie 25 ml przegotowanej wody do podstawy. **WAŻNE!** Wlanie zbyt małej ilości wody może spowodować uszkodzenie etui. Wlanie zbyt dużej ilości wody może spowodować niewłaściwą dezynfekcję.
3. Włóż osłonki piersi do etui.
4. Szczelnie nałóż pokrywkę.
5. Zamknięte etui umieść w kuchence mikrofalowej.
6. Dla mikrofalówek o mocy 750-1000W czas dezynfekcji wynosi 2 minuty. Nie przekraczaj czasu dezynfekcji.

UWAGA!

- Podczas dezynfekcji etui musi stać na równej powierzchni.
- Przed wyjęciem etui z mikrofalówki poczekaj co najmniej 5 minut, aby pojemnik ostygł.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i otwierania.
- Wylej pozostałą wodę z etui przez specjalny otwór, opłucz je i osusz.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania zdezynfekowanych przedmiotów, ponieważ mogą być gorące.
- Odczekaj 15 minut przed kolejną dezynfekcją, aby etui całkowicie ostygło.

Sposób użycia:

- Osłonki utrzymuj w czystości.
- Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz.
- Dezynfekuj osłonki gotując je we wrzącej wodzie przez około 3 minuty.
- Osłonek nie można myć w zmywarce.
- Do czyszczenia nie używaj środków antybakteryjnych. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchnię narzędzi.
- Osłonki można dezynfekować w załączonym etui zgodnie z instrukcją.
- Nie pozostawiaj osłonek w miejscu nasłonecznionym lub gorącym.
- Osłonkę należy nakładać na suchą i czystą pierś.
- Nie stosować kremów ani wazelin.
- Wyrób sprawdź przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzuć.
- Nie dziurkuj i nie powiększaj otworów osłonek, może to spowodować ich zniszczenie.

- Przed zastosowaniem produktu zaleca się konsultacje z położną lub lekarzem pediatrą.
- **Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.**
- Czyste i suche osłonki przechowuj w etui.

Producent:

Canpol Sp. z o. o., ul. Puławska 430, 02-884 Warszawa