

CHECK UP, test SARS-COV-2, Nasal Antigen Rapid Test, test na Covid, 1 sztuka



Cena: 1,00 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	RC MEDICAL SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Check up Szybki test antygenowy Covid-19 - 1 sztuka

Właściwości:

- Szybki domowy test antygenowy Covid -19 CHECK UP
- Test do samodzielnego stosowania
- Czuły i dokładny
- Wynik testu już po upływie 15 minut.
- Wynik na podstawie próbki wymazu z nosa

SKŁAD:

- 1 x kasetka testowa
- 1 x sterylny wacik
- 1 x biohazard Torba
- 1 x roztwór do ekstrakcji

- 1x instrukcja użytkownika

Sposób użycia:

- Oprócz instrukcji znajdziesz również kasetę testową, sterylny wacik oraz roztwór do ekstrakcji.
- Przy pomocy sterylnego wacika należy pobrać wymaz z obu nozdrzy, a następnie umieścić wymazówkę w probówce - w tym celu należy oderwać jej część w miejscu przerwania.
- Wymaz wraz uszkodzoną wymazówką powinien znaleźć się w środku probówki.
- W tym momencie należy zakręcić probówkę i przez 15 sekund mieszać.
- Po tym czasie odrywa się górną część nasady tuby i 2 krople dodaje w otworze kasety testowej.
- Wynik otrzymasz po 15 minutach.

Ważne:

- Pełnia instrukcja znajduje się w zestawie testowym, z którą należy się zapoznać przed przeprowadzeniem testu.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi oraz interfejs użytkownika w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.