

Ciśnieniomierz Omron automatyczny naramienny M2

Cena: 149,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	PRODUCENCKA CENTRALA FARMAC.PROCEFAR SP. Z O.O
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Omron, Ciśnieniomierz automatyczny naramienny, model M2(HEM-7143-E)

- Ciśnieniomierz OMRON M2 to prosty sposób na uzyskanie dokładnych wyników.
- Urządzenie to jest ciśnieniomierzem cyfrowym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u pacjentów dorosłych
- Urządzenie wykrywa nieregularne bicie serca podczas pomiaru i informuje o nim za pomocą symbolu wyświetlanego wraz z odczytem
- Produkt służy głównie do użytku domowego

Opis produktu:

- M2 ma wygodną konstrukcję typu „one-touch” i duży wyświetlacz.
- Wykrywanie nieregularnego bicia serca
- Technologia Intellisense zapewnia komfortowy i dokładny pomiar
- Wskaźnik założenia mankieta

- Pamięć - 30 pomiarów
- Wyświetlacz cyfrowy LCD
- Zakres ciśnienia dla mankiet - od 0-299 mmHG
- Zakres pomiaru tętna - od 40-180 uderzeń/min
- Zakres pomiaru ciśnienia krwi - SYS od 60-260 mmHg
- Zakres pomiaru ciśnienia krwi - DIA od 40-215 mmHg
- Pompowanie - automatyczne za pomocą pompy elektrycznej
- Tryb pracy - praca ciągła
- Źródło zasilania - 4 bateria AA 1,5 V lub opcjonalnie zasilacz (prąd zmienny, napięcie wejściowe 100-240V)
- Obwód mankieta - od 170 do 420 mm (z mankiem: od 220 do 320 mm)
- Trwałość baterii - około 900 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych
- Okres eksploatacji (trwałość użytkowa) - ciśnieniomierz - 5 lat, mankiet - 5 lat

Zawartość opakowania:

- Ciśnieniomierz
- Mankiet
- 4 bateria AA
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- pokrowiec

Sposób użycia:

- 5 minut przed odpręż się i odpocznij
- Załóż mankiet na lewe ramię
- Koniec mankieta wyposażony jest w przewód powietrza, powinien znajdować się 1-2 cm powyżej zgięcia łokcia.
- Upewnij się, że przewód powietrza znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia i owiń starannie mankiet aby się nie zsuwał
- Przyjmij prawidłową pozycję ciała.
- Usiądź wygodnie, opierając plecy i ramię
- Mankiet powinien znajdować się na wysokości serca
- Stopy ułożyć płasko na podłodze, nie krzyżować nóg, siedzieć spokojnie, bez ruchu i nie rozmawiać

- Po naciśnięciu przycisku START/STOP następuje pomiar i jego automatyczny zapis

Ostrzeżenia:

- Nigdy nie należy stawiać rozpoznania ani samodzielnie podejmować leczenia na podstawie uzyskiwanych odczytów. KAŻDORAZOWO należy skonsultować się z lekarzem.

Utylizacja:

- Należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i przetwarzać go w sposób odpowiedzialny, działając na rzecz ponownego wykorzystania zasobów materiałowych
- Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- **Produkt posiada 5 letnią gwarancję**

Producent:

Omron Healthcare 53 Kunotsubo, Terado-choMuko, KYOTO 617-0002 Japan

Dystrybutor:

PCF Pocefarm Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F 51-131 Wrocław