

Compeed, plastry na opryszczkę, hydrokoloidowe, dyskretne, 15 sztuk

Cena: 37,50 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Compeed, plastry na opryszczkę, hydrokoloidowe, dyskretne, 15 sztuk

Opis produktu:

- Dyskretny plaster leczniczy na opryszczkę Compeed zawiera ultracienki żel hydrokoloidowy, który tworzy **optymalne wilgotne środowisko do gojenia rany, przyspiesza proces leczenia i nie dopuszcza do powstawania strupa.**
- Działa w sposób nieprzerwany aż do 12 godzin od pierwszego zastosowania.
- Jest skuteczny już przy pierwszych oznakach opryszczki wargowej, takich jak uczucie pieczenia, mrowienia czy swędzenia, i działa na wszystkich etapach, po to, aby jak najszybciej zahamować nasilenie się opryszczki.
- Tworzy barierę ochronną przed zewnętrznym środowiskiem i zanieczyszczeniami, co pozwala zmniejszyć ryzyko zakażenia przez kontakt z raną i wystąpienia zaczerwienień.
- Jego dyskretna, niewidoczna konstrukcja, nie tylko zwalcza opryszczkę, ale także pomaga uniknąć poczucia zakłopotania i wstydu towarzyszącemu przy wystąpieniu opryszczki.

- Plaster posiada ultra kleiste, zwężające się krawędzie, dzięki którym nie odkleja się i nie ogranicza ruchu ust. Co więcej, krawędzie te są półprzezroczyste, dzięki czemu są niewidoczne na skórze, zastępują zmianę opryszczkową, a na plaster można nałożyć makijaż.
- Plaster odkleja się samoczynnie po około 12 godzinach i powinien zostać wówczas zastąpiony nowym.

Właściwości:

- niewidoczny, dzięki półprzezroczystym krawędziom,
- ultracienki,
- z żelem hydrokolidowym,
- działa aż do 12 godzin,
- posiada ultra kleiste, zwężające się krawędzie,
- nie ogranicza ruchu ust,
- odkleja się samoczynnie po około 12 godzinach,
- na plaster można nałożyć makijaż.

Skład:

- Żel hydrokolidowy.

Sposób użycia:

- Łatwy do nałożenia
- Nie stosować na miejsca posmarowane kremem

Przeciwwskazania i ostrzeżenia:

- Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Nie stosować na rany zakażone, inne niż opryszczka.
- Osoby z cukrzycą lub zaburzeniami odporności powinny przed użyciem poradzić się lekarza.
- Pod plastrem nie wolno stosować innych preparatów na opryszczkę do nakładania miejscowego.

Uwaga:

- Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy rozpocząć terapię plastrami już w momencie gdy pojawi się pierwsze mrowienie na ustach.
- Należy kontynuować używanie plastrów w ciągu dnia i nocy, aż do całkowitego wyleczenia zmian opryszczkowych.

- Plastry Compeed na opryszczkę należy nosić 24 godziny na dobę, do momentu wyleczenia opryszczki.
- Plaster odkleja się samoczynnie po ok. 12 godzinach i powinien zostać wówczas zastąpiony nowym.
- Skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem, jeśli opryszczka jest bolesna i/lub nie udało się jej wyleczyć przez dłuższy czas.
- Nie używać na miejsca posmarowane kremem, gdyż plaster może nie utrzymać się na tłustej skórze i nie dostarczyć wszystkich korzyści podczas leczenia.
- Nie używać ponownie tego samego plastra (mogłoby to doprowadzić do infekcji i rozprzestrzenianie się wirusa).

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Zawartość opakowania: 15 plastrów

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Labolatories HRA Pharma 200 avenue de Paris 92320 Chatillon, Paris

Dystrybutor:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa