

Contour Plus, paski do oznaczania glukozy we krwi, 50 sztuk

Cena: 39,03 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Ascensia Diabetes Care
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Contur Plus, paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi, do glukometru, 50 sztuk

Pasek testowy Contur Plus jest przeznaczony do zastosowania ze wszystkimi glukometrami Contur Plus do pomiaru stężenia glukozy we krwi.

Produkt jest odpowiedni do użycia z:

- Glukometrami Contour Plus

Zastosowanie:

- Do oznaczania stężenie glukozy we krwi.

Sposób użycia:

Nanoszenie krwi na pasek testowy: przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi

rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego.

Testy paskowe są bardzo czułe na występującą w powietrzu wilgoć. Nie wyjmuj testów mokrymi rękami i zamykaj pojemnik testów paskowych oryginalną pokrywką natychmiast po wyjęciu z niego testu. Pokrywka pojemnika z testami zawiera substancje osuszającą, chroniąca testy przed wilgocią. Jeśli wilgoć wniknie do pojemnika, np. przez wilgotne ręce, albo pojemnik pozostanie otwarty przez dłuższy czas, substancja osuszająca straci swoje właściwości. Korzystanie z nieużytecznych testów paskowych może prowadzić do powstawania błędnych wyników.

Nieprzestrzeganie poniższych punktów może prowadzić do powstania błędnych pomiarów:

- używaj wyłącznie testów paskowych, których data ważności jeszcze nie upłynęła;
- nie wyjmuj testu z pojemnika mokrymi rękami;
- dokładnie i szczerze zamykaj pojemnik zbiorczy testów;
- nie zginaj testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru;
- nie zginaj i nie poruszaj testem paskowym przed lub podczas nanoszenia na niego krwi i podczas trwania pomiaru.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny do jednorazowego użytku. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci.
- Nie używać ponownie.
- Po użyciu wyrzucić do kosza.

Producent:

Ascensia Diabetes Care Holding AG, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Szwajcaria.

Dystrybutor:

Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.