

# Contour TS, Paski do oznaczania glukozy we krwi, do glukometru, 50 sztuk



Cena: 39,08 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Ascensia Diabetes Care
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Wyrób medyczny do samokontroli

## Contur TS, paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi, do glukometru, 50 sztuk

Pasek testowy Contur TS jest przeznaczony do zastosowania z glukometrem Contur TS do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Badanie zapewnia ilościowy pomiar stężenia glukozy we krwi w zakresie od 10 do 600 mg/dl.

Produkt jest odpowiedni do użycia z:

- Glukometr Contour TS

### Zastosowanie:

- Do oznaczania stężenie glukozy we krwi.

## Sposób użycia:

**Nanoszenie krwi na pasek testowy:** przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego.

Testy paskowe są bardzo czułe na występującą w powietrzu wilgoć. Nie wyjmuj testów mokrymi rękami i zamykaj pojemnik testów paskowych oryginalną pokrywką natychmiast po wyjęciu z niego testu. Pokrywka pojemnika z testami zawiera substancje osuszającą, chroniącą testy przed wilgocią. Jeśli wilgoć wniknie do pojemnika, np. przez wilgotne ręce, albo pojemnik pozostanie otwarty przez dłuższy czas, substancja osuszająca straci swoje właściwości. Korzystanie z nieużytecznych testów paskowych może prowadzić do powstawania błędnych wyników.

**Nieprzestrzeganie poniższych punktów może prowadzić do powstania błędnych pomiarów:**

- używaj wyłącznie testów paskowych, których data ważności jeszcze nie upłynęła;
- nie wyjmuj testu z pojemnika mokrymi rękami;
- dokładnie i szczerze zamykaj pojemnik zbiorczy testów;
- nie zginaj testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru;
- nie zginaj i nie poruszaj testem paskowym przed lub podczas nanoszenia na niego krwi i podczas trwania pomiaru.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny do jednorazowego użytku. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci.
- Nie używać ponownie.
- Po użyciu wyrzucić do kosza.

## Producent:

Ascensia Diabetes Care Holding AG, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Szwajcaria.

## Dystrybutor:

Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.