

## COREGA Frisch krem do protez 40g



Cena: 18,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA

Typ produktu Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Corega Frisch krem do protez, 40g

### Wyrób medyczny

Zapewnia mocne, całodniowe utrzymanie protezy zębowej. Uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię. Zapewnia komfort noszenia protezy.

### Właściwości produktu:

- Chroni dziąsła przed otarciami.
- Zapewnia trwałość mocowania protezy przez cały dzień.

### Zastosowanie:

Krem Corega Frisch służy do mocowania górnej, dolnej lub częściowej protezy.

### Sposób użycia:

Należy użyć niewielką ilość kremu do protez. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy.

### Aplikowanie:

- Umyj i wysusz protezę.
- Nanieś kilka krótkich pasków kremu Corega na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi (jak pokazano na opakowaniu).
- Wypłucz jamę ustną przed włożeniem protezy do ust.
- Włóż protezę, dociśnij ją mocno i na kilka sekund przygryź.
- Użyj małej ilości kremu, jeśli stosujesz go po raz pierwszy. Ustalenie, jaka ilość kremu będzie odpowiednia może wymagać kilku prób. Odczekaj kilka minut zanim będziesz jeść lub pić. Zawsze przestrzegaj instrukcji stosowania podanych na opakowaniu.

## Zdejmowanie:

- Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta ciepłą wodą.
- Wyjmij protezę powoli, delikatnie nią poruszając.
- Żeby usunąć z protezy zębowej resztki kremu, zanurz ją w roztworze tabletek czyszczących Corega według instrukcji stosowania i usuń pozostałości kremu szczoteczką.
- Aby usunąć krem mocujący z jamy ustnej, szczotkuj podniebienie i dziąsła szczoteczką i ciepłą wodą.

## Skład:

Ca/Na PVM/MA Copolymer - Calcium/sodium (mixed partial salt) Poly (methylvinylether/maleic acid Copolymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum, Propylparaben, Aroma, CI 45430 (Erytrozyna, sól sodowa tetrajodofluoresceiny). Nie zawiera cynku.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosować raz dziennie. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem dentystą.
- Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nieliczne osoby mogą być uczulone na składniki tego produktu.
- Jeżeli wystąpi podrażnienie, należy zaprzestać używania.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników kremu.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu stosowanie produktu należy przestać.

## Ważne informacje:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**

## Dystrybutor:

GHC Hurtownia Stomatologiczna ul. Kresowa 23; 22-400 Zamość

## Masa netto: 40g