

Corega Tabs Bio Formula 136 sztuk



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA

Typ produktu Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Corega Tabs, tabletki do czyszczenia protez 136 sztuk

Wyrób medyczny

Właściwości produktu:

Formuła MicroClean działa trójfazowo: usuwa nieprzyjemny zapach, czyści nie uszkadzając powierzchni, usuwa przebarwienia. Do codziennego stosowania zamiast pasty do zębów, dla zachowania czystych i lśniących zębów.

Efektywne i delikatne usuwanie bakterii: Corega Tabs nie zawiera substancji ścierających i czyści protezę dokładnie i delikatnie.

Zapobiega podrażnieniom dziąseł: Corega Tabs usuwa skutecznie bakterie, które mogą podrażniać dziąsła.

Higieniczna świeżość: Usuwa 99,9% nieprzyjemnego zapachu z ust spowodowanego przez bakterie. Wysokiej jakości olejek miętowy zapewnia wysoką świeżość.

Zastosowanie:

Tabletki Corega służą do czyszczenia protez.

Sposób użycia:

- Jedną tabletkę Corega Tabs wrzucić do ciepłej wody (nie może być gorąca), tak żeby cała proteza była w wodzie.
- Sztuczną szczękę wyjąć ze szklanki po 15 minutach i oczyścić miękką szczoteczką.
- Protezę opłukać pod bieżącą wodą, a pozostałość roztworu po płukaniu wylać.

Skład:

Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide, TAED, Sodium Benzoate, PEG - 180, Sodium Lauryl Sulfate, VP/VA Copolymer, Aroma, Subtilisin, Cellulose Gum, CI 42090, CI 73015.

Uwaga:

Tabletek czy roztworu do płukania nie brać do ust. Zabrania się picia roztworu czy też używania go jako płynu do płukania ust. Unikać kontaktu tabletek czy roztworu z oczami bądź ustami. Nie stosować w przypadku uczulenia na jakiś składnik tabletek Corega Tabs.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Połknięcie tabletki bądź roztworu jest szkodliwe dla zdrowia.
- Może wywoływać reakcje alergiczne.
- Po użyciu tabletek należy dokładnie umyć ręce.
- Przy kontakcie z oczami opłukać wodą. Jeśli swędzenie oczu będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.
- Trzymać z dala od dzieci oraz osób, które mogłyby połknąć tabletki bądź wypić roztwór.
- W przypadku połknięcia jak najszybciej skontaktować się z lekarzem bądź udać się na pogotowie ratunkowe.

Ważne informacje:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE 1639
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Dystrybutor:

PPHU Mini-Maxi, 41-948 Piekary Śląskie, ul. Rychła 18

Zawartość netto: 136 tabletek