

Corega Tabs Intensiv tabletki do czyszczenia protez 108 tabletek



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	F.H.D & I DAMIAN ILMAK
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Corega Tabs, Intensiv, Tabletki do czyszczenia protez, 108 sztuk

Zachowanie czystej i lśniącej protezy

Sposób działania:

- **Formuła MicroClean** działa trójfazowo usuwa nieprzyjemny zapach, czyści nie uszkadzając powierzchni, usuwa przebarwienia
- do stosowania codziennego zamiast pasty do zębów, dla zachowania czystych i lśniących zębów
- **Efektywne i delikatne usuwanie bakterii.** Corega Tabs nie zawiera substancji ścierających i czyści protezę dokładnie i delikatnie.
- **Zapobiega podrażnieniom dziąseł.** Corega Tabs usuwa skutecznie bakterie, które mogą podrażniać dziąsła
- **Higieniczna świeżość.** usuwa 99,9% nieprzyjemnego zapachu z ust spowodowanego przez bakterie. Wysokiej jakości olejek miętowy zapewnia wysoką świeżość

Stosowanie:

- 1 tabletkę Corega Tabs wrzucić do ciepłej wody (nie może być gorąca), tak żeby cała proteza była w wodzie.
- Sztuczną szczękę wyjąć ze szklanki po 15 min i oczyścić miękką szczoteczką.
- Protezę opłukać pod bieżącą wodą a pozostałość roztworu po płukaniu wylać.
- **Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia**

Skład:

Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Carbonate, TAED, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, VP/VA Copolymer, Cellulose Gum, CI 42090, CI 73015

Ostrzeżenia:

- Tabletek czy roztworu do płukania nie brać do ust.
- Zabrania się picia roztworu czy też używania go jako płynu do płukania ust.
- Unikać kontaktu tabletek czy roztworu z oczami bądź ustami.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na jakiś składnik tabletek Corega tabs
- Połknięcie tabletki bądź roztworu jest szkodliwe dla zdrowia, może wywołać reakcje alergiczne
- W przypadku połknięcia jak najszybciej skontaktować się z lekarzem bądź udać się na pogotowie ratunkowe.
- Po użyciu tabletek należy dokładnie umyć dłonie.
- Przy kontakcie z oczami opłukać wodą. Jeśli swędzenie oczu będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli występuje swędzenie zaprzestać stosowania Corega Tabs i skonsultować dalsze stosowanie z lekarzem stomatologiem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Trzymać z dala od dzieci oraz osób, które mogłyby połknąć tabletki bądź wypić roztwór.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i źródłami ciepła.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 1639
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

GSK Consumer Healthcare D-80258 Munchen

Dystrybutor:

GHC Hurtownia Stomatologiczna ul. Kresowa 23 , 22-400 Zamość