

Dexoftyal żel nawilżający do oczu 10 g

Cena: 26,19 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Verco
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Dexoftyal, żel do oczu, tuba, 10g

Nawilżający żel do oczu zawierający dekspantenol 5%

Wskazania:

- łagodzenie suchości oczu
- ochrona powierzchni oka
- pieczenie
- zmęczenie
- zaczerwienienie
- uczucie obecności ciała obcego
- długotrwała praca przed ekranem komputera, tabletu
- długotrwałe patrzenie w ekran telewizora
- stosowanie soczewek kontaktowych
- prowadzenie samochodu

- przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach
- czynniki środowiskowe - wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, światło, klimatyzacja, ogrzewanie

Działanie:

- utrzymanie nawilżenia
- ochronę powierzchni oka
- długotrwałe łagodzenie objawów suchości oczu
- uzyskanie lepkości odpowiadającej lepkości łez

Skład:

Dekspantenol 5% (m/V), 20% roztwór wodorotlenku sodu, karbomer, sól dwusodowa kwasu wersenowego, cetrymid, woda do wstrzykiwań.

Sposób użycia:

- odkręcić tubę, odchylić głowę do tyłu i odciągnąć w dół dolną powiekę, formując kieszonkę.
- powoli ścisnąć tubę do momentu pojawienia się na jej końcówce małej kropli, podać kroplę do oka, a następnie, mrugając dwa do trzech razy, rozprowadzić równomiernie kroplę po powierzchni oka, po czym zetrzeć nadmiar żelu z okolic powiek.
- należy pamiętać o zamknięciu tuby.

Przeciwwskazania:

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu Dexoftyal żel

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- przechowywać w temperaturze do 25°C
- chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.
- nie stosować jeżeli uszczelka pod nakrętką jest zerwana lub uszkodzona
- do użytku jednorazowego
- Wyrzucić pozostałą zawartość po 8 tygodniach od pierwszego otwarcia tuby.

Środki ostrożności:

- pacjenci nadwrażliwi na którykolwiek ze składników nie powinni stosować wyrobu
- produktu nie wolno połykać
- w przypadku stosowania jakiegokolwiek dodatkowego preparatu okulistycznego należy zachować odstęp co najmniej 15 minut między aplikacjami
- w rzadkich przypadkach przejściowo może wystąpić niezbyt nasilone nieostre widzenie z powodu lepkości żelu, dlatego zaleca się odczekanie od ustąpienia nieostrego widzenia przed podjęciem czynności wymagających dobrej ostrości wzroku.
- przed użyciem należy usunąć soczewki kontaktowe, po zastosowaniu należy odczekać minimum 15 minut przed ponownym założeniem
- nie dotykać oka końcówką tuby

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0546
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
- Żel można stosować w sposób ciągły przez 30 dni. Jeżeli objawy będą się utrzymywać, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Wyrzucić pozostałą zawartość po 8 tygodniach od pierwszego otwarcia tuby.

Zawartość netto: tuba 10 g

Producent:

Farmigea Włochy

Dystrybutor:

Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6 U, 01-015 Warszawa