

Diather, Test, Infekcje, intymne, wymaz, z pochwy 1 sztuka



Cena: 15,80 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Diather
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Diather Test Infekcje intymne - 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

Test infekcje intymne (1 test) domowy, panelowy test do określania zakresu pH pochwy w celu identyfikacji infekcji intymnych.

Zastosowanie:

- Szybki test przeznaczony jest do oznaczania zakresu pH pochwy, próbką do badań jest wymaz z pochwy.
- Test pomocny jest w szybkim diagnozowaniu infekcji intymnych.

Wskazania do wykonania testu:

- Świąd w okolicach pochwy.
- Zaczerwienienie pochwy i sromu.

- Charakterystyczne upławy.
- Bolesność i pieczenie sromu.
- Specyficzny zapach.
- Ból podczas stosunków płciowych.

TEST INFEKCJE INTYMNE jest przeznaczony do samodzielnego określania zakresu pH pochwy, a tym samym sprawdzania czy poziom pH mieści się w zakresie prawidłowym i czy nie jesteś narażona na infekcje okolic intymnych. **Fizjologiczny poziom pH w pochwie jest kwaśny i waha się w zakresie 3,8 - 4,4.** Taki właśnie odczyn pH zabezpiecza środowisko pochwy i zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych przyczyniających się do powstania infekcji intymnych.

Kiedy wykonać test?

Test można wykonać o dowolnej porze, jednak istnieją pewne ograniczenia, których nieprzestrzeganie wpływa na wiarygodność wyniku. Zaleca się zapoznanie z treścią rozdziału ŚRODKI OSTROŻNOŚCI w niniejszej instrukcji.

Kiedy nieprawidłowy zakres wyniku nie świadczy o infekcji intymnej?

U niektórych kobiet w okresie menopauzy obserwuje się podwyższenie pH pochwy. Uzyskany wynik testu będzie świadczył o zakresie nieprawidłowym, niespowodowanym infekcją intymną o podłożu bakteryjnym lub pasożytniczym.

Co wpływa na błędny wynik?

Uzyskane wyniki testu są zależne od przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji użycia. W przypadku, gdy panel testowy ulegnie zamoczeniu lub zastosowano niewłaściwą procedurę badania, wynik badania może być nieprawidłowy. Wyniki zaleca się skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Sposób użycia:

- Pobrać próbkę do badania z pochwy.
- Pocierając 5-krotnie zaaplikować próbkę, niezwłocznie odczytać wynik.

Zawartość opakowania:

- 1 saszetka z testem panelowym i pochłaniaczem wilgoci.
- 1 wymazówka do pobrania próbki.
- Instrukcja użycia w języku polskim.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Producent:

- Diather Sp. z o.o. Sp. K., ul. Twarda 1/14, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.