

Diather, Test, Magni-Man Pro, płodność mężczyzn, 1 sztuka



Cena: 28,00 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Diather
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Diather Test Magni-Man Pro - 1 sztuka

Płodność mężczyzn

Właściwości

- Test Magni-Man Pro to immunochromatograficzny test kasetkowy przeznaczony na jakościowe wykrywanie białka akrosomalnego SP-10 obecnego w nasieniu.
- Pozwala on na samodzielne i bezstresowe wykonanie testu w warunkach domowych u mężczyzn, którzy planują powiększyć rodzinę.

Zastosowanie

- Test Magni Man Pro służy do oceny czy stężenie plemników w ludzkim nasieniu wynosi poniżej, czy powyżej 15 milionów/ml.
- Informacja o stężeniu plemników może być wykorzystana jako pomoc w diagnostyce oraz w sprawdzaniu efektów terapeutycznych leczenia męskiej niepłodności.

Sposób użycia

- Dodaj próbkę nasienia do probówki z buforem.
- Wstrząśnij, dokładnie wymieszaj.

- Dodaj 2 krople próbki do studzienki S.
- Odczekaj 5 minut i sprawdź wynik.
- Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w opakowaniu testu.

Zawartość opakowania:

- 1 x saszetka z testem kasetowym
- 1x strzykawka
- 1xbufor
- 1x pojemnik na próbkę,
- instrukcja użycia

Uwagi:

- Wyrób medyczny jednorazowego użytku.
- Uzyskane wyniki testu są zależne od przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji użycia.
- Pobranie nasienia przed upływem 2 dni lub po 7 dniach od ostatniej ejakulacji może wpłynąć negatywnie na dokładność wykonanego testu.
- Nie należy stosować próbki pobranej wcześniej niż 12 godzin przed rozpoczęciem testu.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ważne:

- **Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.**
- Posiada oznakowanie CE 0123.
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**

Producent:

- Diather Sp. z o.o. Sp. K., ul. Twarda 1/14, Warszawa.