

Diather Test NarkoTHC mocz, 1 sztuka



Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Diather Test Narko THC mocz wykrywa marihuanę i haszysz - 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

Opis:

Szybki test paskowy TEST NARKO THC mocz jest testem przeznaczonym do jakościowego wykrywania THC w moczu występującym w stężeniu granicznym 50 ng/ ml. Działanie THC utrzymuje się przez ok. 2 godziny po wypaleniu pojedynczego papierosa z marihuana, obecność substancji w organizmie można stwierdzić od 3 do 10 dni po jej zażyciu.

Sposób użycia:

Należy pobrać próbkę moczu do czystego i suchego pojemnika, następnie zanurzyć test w próbce moczu przez 10-15 sekund, odczekać 5 minut a następnie sprawdzić wynik.

Interpretacja wyników:

- Wynik negatywny:

W badanym moczu nie stwierdzono obecności narkotyków, gdy w polu testowym pojawiają się dwa barwne prążki - w strefie testowej T i w strefie kontrolnej C. Wynik negatywny oznacza, że stężenie narkotyku w moczu jest niższe od poziomu wykrywalności testu.

- **Wynik pozytywny:**

W badanym moczu stwierdzono obecność narkotyków, gdy w polu kontrolnym C pojawi się jedna barwna linia. Wynik pozytywny oznacza, że stężenie narkotyków w moczu jest wyższe od poziomu wykrywalności testu.

- **Wynik nieważny:**

Brak reakcji lub wystąpienie wyłącznie paska testowego T świadczy o nieważności wyniku badania. W takiej sytuacji należy powtórzyć badanie z wykorzystaniem nowego zestawu diagnostycznego.

Zawartość opakowania:

- 1 saszetka z testem panelowym i pochłaniaczem wilgoci.
- Instrukcja użycia.

Dystrybutor: Diather Sp. z o.o. Sp. K., ul. Twarda 1/14, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Uwaga:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Podmiot odpowiedzialny:

Masters Sp.z.o.o.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.