

# Diather Test NarkoTHC mocz, wykrywa marihuanę i haszysz

## 1 sztuka



Cena: 10,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Diather Test Narko THC mocz wykrywa marihuanę i haszysz, 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

### Opis:

Szybki test paskowy TEST NARKO THC mocz jest testem przeznaczonym do jakościowego wykrywania THC w moczu występującym w stężeniu granicznym 50 ng/ ml. Działanie THC utrzymuje się przez ok. 2 godziny po wypaleniu pojedynczego papierosa z marihuana, obecność substancji w organizmie można stwierdzić od 3 do 10 dni po jej zażyciu.

### Sposób użycia:

Należy pobrać próbkę moczu do czystego i suchego pojemnika, następnie zanurzyć test w próbce moczu przez 10-15 sekund, odczekać 5 minut a następnie sprawdzić wynik.

### Interpretacja wyników:

- **Wynik negatywny:**

W badanym moczu nie stwierdzono obecności narkotyków, gdy w polu testowym pojawiają się dwa barwne prążki - w strefie testowej T i w strefie kontrolnej C. Wynik negatywny oznacza, że stężenie narkotyku w moczu jest niższe od poziomu wykrywalności testu.

- **Wynik pozytywny:**

W badanym moczu stwierdzono obecność narkotyków, gdy w polu kontrolnym C pojawi się jedna barwna linia. Wynik pozytywny oznacza, że stężenie narkotyków w moczu jest wyższe od poziomu wykrywalności testu.

- **Wynik nieważny:**

Brak reakcji lub wystąpienie wyłącznie paska testowego T świadczy o nieważności wyniku badania. W takiej sytuacji należy powtórzyć badanie z wykorzystaniem nowego zestawu diagnostycznego.

**Zawartość opakowania:**

- 1 saszetka z testem panelowym i pochłaniaczem wilgoci.
- Instrukcja użycia.

## Dodatkowe informacje:

- To jest wyrób medyczny do samokontroli. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przed użyciem produktu zawsze należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.

## Producent:

W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang, Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R. China.

## Dystrybutor:

Diather Petruszewicz Sp. K., ul. Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk.