

Diather, Test, Płodność mężczyzn, Magni-Man, do oznaczania stężenia plemników, 2szt.@



Cena: 50,95 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Diather
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Test Magni - Man płodność mężczyzn - 2 sztuki

TEST DO SAMOKONTROLI

Domowy kasetkowy test do oznaczenia stężenia plemników w próbce nasienia ludzkiego.

TEST MAGNI-MAN - (2 TESTY) domowy, kasetkowy test do jakościowego oznaczania stężenia plemników w próbce nasienia ludzkiego.

Wskazania do wykonania testu:

- Kontrola płodności u mężczyzn.
- Przebadanie nasienia.

Właściwości:

- Wiarygodny.
- Dyskretny.
- Wygodny.

- Szybki.
- Wysoka dokładność.

Zastosowanie:

- Szybki test przeznaczony jest do oznaczania zawartości plemników w próbce nasienia ludzkiego.
- Test jakościowy, wynik otrzymujemy zaledwie w 2 minuty.
- Test jest środkiem pomocniczym w diagnostyce i obserwacji leczenia niepłodności u mężczyzn.
- Za pomocą testu określimy zawartość plemników w nasieniu w odniesieniu do wartości granicznych.
- Wynik testu wskazujący stężenie plemników niższe niż poziom testowy 15mln/ml, może wskazywać na oligozoospermie oraz czynnik męskiej niepłodności.

Sposób użycia:

- Próbkę nasienia należy pozyskać poprzez stymulację ręczną (masturbację) bezpośrednio do załączonego do zestawu pojemnika.
- Następnie konieczna jest 15-minutowa inkubacja próbki w pojemniku ze sproszkowanym odczynnikiem w celu jej upłynnienia, tak aby możliwe było dalsze przeprowadzenie testu.
- Do pobierania nasienia nie należy stosować prezerwatyw.
- Należy zwrócić uwagę na odpowiedni czas reakcji nasienia z roztworami.
- W przypadku, gdy nie obserwuje się prawidłowego nasiąkania błony w okienku A, może to wskazywać na zbyt wysoką gęstość próbki i wówczas zaleca się powtórzenie testu z zachowaniem procedury testowej, a w szczególności wykorzystanie do pobrania próbki nasienia pojemnika załączonego do zestawu.
- Następnie kroplę próbki należy nanieść w odpowiednie miejsce na kasetce testowej i odczytać wynik po 2 minutach.

1. Nanieść 1 kroplę próbki do okienka A.
2. Dodać 3 krople odczynnika barwiącego.
3. Dodać 2 krople odczynnika płuczącego.
4. Odczekać 2 minuty, sprawdzić wynik.

Zawartość opakowania:

- 2 x saszetka z testem kasetkowym, pipetą nakraplającą.
- 2 x pojemniki na próbkę.
- 1 pojemnik z zakraplaczem z roztworem barwiącym.
- 1 pojemnik z zakraplaczem z roztworem płuczącym.

- 1 statyw na próbki.
- 1 karta z procedurą badania.
- Instrukcja użycia.

Uwaga:

- Wyrób medyczny jednorazowego użytku.
- Uzyskane wyniki testu są zależne od przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji użycia.
- Pobranie nasienia przed upływem 2 dni lub po 7 dniach od ostatniej ejakulacji może wpłynąć negatywnie na dokładność wykonanego testu.
- Nie należy stosować próbki pobranej wcześniej niż 12 godzin przed rozpoczęciem testu.
- Wynik odbiegający od normy nie oznacza, że po stosunku kobieta nie zajdzie w ciążę i nie powinien być on traktowany jako powód do unikania stosowania antykoncepcji.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Producent:

- Diagnosis S.A. ul. Gen. W. Andersa 38A 15-113 Białystok, Polska.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.