

## Disnemar, Spray izotoniczny do nosa, 25 ml



Cena: 26,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Mylan EPD
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Disnemar, Spray izotoniczny do nosa, 25 ml

### Wskazania:

Disnemar woda morską do nosa to izotoniczny roztwór soli mineralnych o **neutralnym pH w sprayu**, przeznaczony do stosowania u **dorosłych oraz młodzieży powyżej 12. roku życia**. Dzięki łagodnej formule, produkt **jest bezpieczny** dla błony śluzowej nosa i nie wywołuje podrażnień.

Spray wyposażono w specjalny aplikator **umożliwiający wygodne stosowanie** w różnych pozycjach, nawet leżącej. Przezroczyste opakowanie pozwala na kontrolę ilości roztworu, a **kompaktowy rozmiar** ułatwia jego przenoszenie i korzystanie w dowolnym momencie.

### Właściwości:

- Regularne stosowanie Disnemar pomaga w utrzymaniu codziennej higieny nosa i wspiera regenerację błony śluzowej.
- Preparat zapewnia odpowiednie **nawilżenie, oczyszczając nos i łagodząc objawy niedrożności** dzięki mechanicznemu działaniu usuwającemu nadmiar wydzieliny.

- Nebulizator mikrodyfuzyjny tworzy delikatną mgiełkę, co zapewnia skuteczne nawilżenie bez podrażnień.

Disnemar jest przeznaczony dla osób dorosłych do:

- codziennej higieny nosa,
- nawilżania wysuszonej śluzówki (z powodu np. klimatyzacji, ogrzewania, dymu papierosowego),
- udrażniania nosa w przypadku kataru lub alergii.

## Sposób użycia:

- Przed pierwszym użyciem naciśnij aplikator 1-3 razy, aby aktywować pompkę.
- Dawkowanie: dorośli – 1-2 dawki do każdego nozdrza, kilka razy dziennie.
- Spray można stosować regularnie i długotrwale.

## Skład:

- Woda oczyszczona o neutralnym pH, elektrolity (jony sodu, potasu, chloru, wodorowęglany), środek konserwujący: chlorek benzalkonium.

## Uwagi:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 lat,
- Unikalny zawór zapobiega cofaniu się roztworu, zachowując jego czystość.
- Można go stosować codziennie, wielokrotnie, przez dłuższy czas.
- Jedna buteleczka wystarcza na około 250 dawek.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

**Producent:**

MEDA Pharma S.p.A. Via Valosa di Sopra, 9 20900 Monza Włochy

**Dystrybutor:**

Mylan EPD Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa