

# Dr. Yglo, preparat do zwalczania brodawek wirusowych, 50 ml



Cena: 36,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Delfarma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Dr.Yglo - preparat do zwalczania brodawek wirusowych

### Opis produktu:

- Dr. Yglo, preparat do usuwania brodawek wirusowych 50 ml, to skuteczne i innowacyjne rozwiązanie, które pomoże Ci pozbyć się niechcianych brodawek. Zaprojektowany przez ekspertów dermatologicznych, ten specjalistyczny preparat jest opracowany z myślą o efektywnym usuwaniu brodawek wywołanych przez wirusy.

#### Szybki i łatwy w użyciu

Dr. Yglo zapewnia szybkie i łatwe w użyciu rozwiązanie dla brodawek wirusowych.

Jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania i nie wymaga skomplikowanego montażu główek lub małych elementów.

#### Bezpieczny

Dr. Yglo oferuje bezpieczne rozwiązanie do usuwania brodawek wirusowych w domu.

Innowacyjny, opatentowany aplikator zapewnia dokładność w usuwaniu "kurzajek".

### Skuteczny

Dr. Yglo gwarantuje wysoce skuteczne, bezpieczne i łatwe usuwanie w warunkach domowych zarówno brodawek wirusowych zwykłych jak i brodawek podeszwowych podczas jednej aplikacji.

### EKSPERCKIE rozwiązanie na "kurzajki"

Zabieg oparty na krioterapii Dr. Yglo® wykorzystuje unikalną i innowacyjną technologię, dającą gwarancję skutecznego i bezpiecznego usuwania brodawek wirusowych.

Jedna aplikacja powinna wystarczyć, aby skutecznie usunąć brodawkę wirusową. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiego zabiegu zaleca się odczekać 14 dni pomiędzy aplikacjami.

## Sposób użycia:

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać ulotkę.
- Instrukcja użytkowania zawarta w ulotce dołączonej do opakowania.

## Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik opatrunku.
- Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.
- Osoby chore na cukrzycę lub z zaburzeniami krążenia krwi nie powinny stosować tego preparatu.
- Nie stosować w przypadku ciąży lub karmienia piersią.
- Nie stosować w miejscach o cienkiej skórze takich jak twarz, pachy, piersi, pośladki, okolice narządów płciowych.
- Nie stosować na podrażnioną skórę, ani na żaden obszar, który jest zakażony, zaczerwieniony lub wykazuje jakiegokolwiek oznaki stanu zapalnego.

## Skutki uboczne:

Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

- Uczucie swędzenia, bólu podczas i po zamrożeniu, który szybko zmniejsza się po rozmrożeniu obszaru.
- Możliwe są zmiany zabarwienia skóry z białego na czerwone
- Możliwość powstania pęcherzy.
- Po kilku dniach w środku brodawki mogą pojawić się czarne kropki.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Przed użyciem należy zawsze przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.

- W przypadku stosowania przez więcej niż jedną osobę i/lub po każdym zastosowaniu należy wyczyścić aplikator przy użyciu małego kawałka materiału nasączonego alkoholem. W przypadku niewłaściwego czyszczenia może dojść do krzyżowego zanieczyszczenia wirusem.
- Unikać kontaktu ze zdrową skórą.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Nie połykać ani nie wdychać oparów/ rozpylonej cieczy.

## Ważne:

- posiada oznakowanie CE 0482
- posiada deklaracje zgodności UE
- zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Pojemnik pod ciśnieniem, może wybuchnąć po ogrzaniu.
- Nie przekłuwać ani nie przypalać nawet po użyciu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Nie palić. Nie rozpylać na otwarty płomień.
- Chronić przed promieniami słonecznymi.

## Dystrybutor:

Delfarma Sp. Z o.o., Dostawcza 17, Łódź

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.