

## Durex, Performa prezerwatywy z żelem, 3 sztuki

Cena: 11,99 PLN



### Opis słownikowy

Producent / Marka	Durex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Durex Performa, prezerwatywy z żelem przedłużającym stosunek - 3 sztuki

Prezerwatywy Durex Performa to prezerwatywy opóźniające wytrysk. Ich ścianki pokryte są od wewnątrz specjalnym środkiem nawilżającym z 5% benzokainą który powoduje przedłużenie stosunku... co oznacza dłuższą rozkosz dla Was obojga.

- o kształcie easy-on
- zakończone zbiorniczkiem
- szerokość: 56 mm
- długość: 190 mm

### Ważne:

- Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje znajdującą się na wewnętrznej stronie opakowania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatywy przy stosunku analnym lub oralnym.
- Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową.
- Używaj prezerwatywy tylko raz.

- Testowane dermatologicznie.
- W 100% testowane elektronicznie

## Uwaga:

- U niektórych osób, lubrykant Performa, znajdujący się na tych prezerwatywach może powodować wysypkę podrażnienie, pieczenie lub swędzenie.
- Unikaj kontaktu z oczami i zmyj po użyciu.
- Jeśli wystąpi podrażnienie zaprzestań używania prezerwatyw Performa. Jeśli nie nastąpi poprawa skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj jeśli u Ciebie lub partnerki występuje stan zapalny lub uszkodzenie skóry.
- NATYCHMIAST PRZESTAŃ UŻYWAĆ I WEZWIJ LEKARZA jeśli
- w trakcie stosowania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust.
- Przedwczesny wytrysk jest częstym problemem który może mieć wiele przyczyn i może wymagać konsultacji/opieki medycznej.
- Jeśli te prezerwatywy nie pomagają skontaktuj się z lekarzem
- Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu suchym, temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych.
- Przeczytaj uważnie ulotkę znajdującą się wewnątrz opakowania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatywy przy stosunku analnym lub oralnym.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 2409
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd Dansom Lane, Hull, HU8 7DS

