

Durex, PleasureMax, prezerwatywy, 12 sztuk



Cena: 45,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Reckitt Benckiser
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Durex Pleasuremax, prezerwatywy z prążkami i wypustkami - 12 sztuk

Durex Pleasuremax to prezerwatyw, które powstały z myślą o Waszej przyjemności. **Stymulujące prążki i wypustki** rozmieszczone na całej długości prezerwatywy **to bardziej intensywne doznania**. Specjalnie zaprojektowana powierzchnia pozwoli wam eksplorować dotychczas nieznanne doznania. Durex Pleasuremax sprawia, że dobry seks staje się jeszcze lepszy!

- grubość ścianek: 0.070 mm
- średnica: 56 mm, długość: 205 mm
- **wzmagające doznania prążki i wypustki**
- przezroczyste
- "easy-on", łatwe do nałożenia
- pokryte środkiem nawilżającym
- naturalna guma lateksowa
- zakończone zbiorniczkiem

Instrukcja

1. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z prezerwatywą, aby uniknąć niezamierzonego uszkodzenia. Przed użyciem sprawdź datę ważności.
2. Ściśnij końcówkę, aby usunąć powietrze i zostawić wystarczająco dużo miejsca na złapanie nasienia. Następnie umieść prezerwatywę na penisie we wzwodzie.
3. Rozwiń prezerwatywę do podstawy członka. Sprawdź, czy czujesz się komfortowo – prezerwatywy, które są zbyt luźne lub zbyt ciasne, mogą prowadzić do pęknięcia.
4. Usuń prezerwatywę zaraz po wytrysku. Wyrzuć zużytą prezerwatywę do kosza na śmieci. Nie sflukuj w toalecie

Ważne:

- Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje znajdującą się na wewnętrznej stronie opakowania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatywy przy stosunku analnym lub oralnym.
- Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową.
- Używaj prezerwatywy tylko raz.
- Testowane dermatologicznie.
- W 100% testowane elektronicznie
- **Wyrób medyczny.**
- Posiada oznakowanie CE 1639
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.