

Ectoclarin, spray do nosa z ektoiną, 20 ml



Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Solinea
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Ectoclarin, spray do nosa z ektoiną, 20 ml

Wskazania:

Ectoclarin spray na alergiczny nieżyt nosa to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w **profilaktyce i leczeniu** objawów kataru siennego.

Preparat łagodzi katar, uczucie świądu w nosie, kichanie oraz przekrwienie śluzówki nosa. Produkt jest odpowiedni dla dzieci, a używany zgodnie z zaleceniami nie stwarza ryzyka dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Właściwości:

- Wspomagająco w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, niezależnie od przyczyny ich powstawania.

Sposób użycia:

Wyrób medyczny Ectoclarin należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkownika. O ile lekarz nie zalecił inaczej:

- **dzieci do 2 lat:** 2 aplikacje do każdego z nozdrzy nie częściej niż 10 razy dziennie,
- **dzieci powyżej 2 lat:** bez ograniczeń.

Ectoclarin nie powinien być stosowany dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

Przed pierwszym użyciem

- Zdejmij nasadkę i naciśnij pompkę dwu-trzykrotnie aż do pojawienia się mgiełki.
- Nie przecinaj końcówki.
- Należy kilkakrotnie wcisnąć mechanizm pompki jeżeli mechanizm sprayu nie działa poprawnie.

Jak aplikować spray do nosa?

- Oczyszczyć nozdrze, wydmuchując nos.
- Zdejmij z butelki nasadkę ochronną.
- Wskazujący i środkowy palec umieść po obu stronach aplikatora, a kciuk pod butelką.
- Pochyl głowę lekko do przodu i zamknij jedno nozdrze, przyciskając płatek nosa palcem.
- Oddychaj spokojnie.
- Naciśnij pompkę zdecydowanym ruchem, aby zaaplikować dawkę do nozdrza, jednocześnie delikatnie wdychając powietrze.
- Włóż końcówkę aplikatora do drugiego nozdrza.
- Zaaplikuj spray do drugiego nozdrza zgodnie ze wskazówkami powyżej.
- Czystą chusteczką przetrzyj końcówkę sprayu.
- Nałóż nasadkę na butelkę.

Skład:

Ektoina, sól morską, woda,

Uwagi:

- Każda butelka ze sprayem Ectoclarin powinna być używana przez jedną osobę (ze względów higienicznych).
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu Ectoclarin w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej.
- Nie stosować jeżeli opakowanie jest uszkodzone bądź przebite.
- Po otwarciu nie stosować dłużej niż 3 miesiące.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

- O wszelkich działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem wyrobu medycznego należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku utrzymywania się lub nasilenia niekorzystnych objawów.

Ectolcarin w ciąży i w okresie karmienia piersią

- Stosowany zgodnie z zaleceniami spray do nosa Ectolcarin nie stwarza ryzyka dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ectolcarin dla dzieci

- Wyrób medyczny Ectolcarin jest odpowiedni do stosowania u dzieci.
- Dzieci poniżej 10 lat oraz osoby niezdolne do samodzielnego stosowania powinny otrzymać pomoc przy aplikacji.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

bitop AG Stockumer Str. 28 58453 Witten, Niemcy

Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K. Elizówka 65, Hala I 21-003 Ciecierzyn