

Emofix, maść hemostatyczna, na krwawienia, z nosa, z drobnych ran skórnych, 30 g



Cena: 33,53 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Dmg
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Emofix, maść hemostatyczna - 30 g

Opis:

- Emofix to maść ochronna, która **wzmacnia działanie naturalnych czynników krzepnięcia krwi**. Jej rolą jest **zapobieganie i powstrzymanie krwawienia ze skóry oraz błon śluzowych**, jak np.: krwotok z nosa czy z niewielkich ran skórnych.

Skład:

- Mieszanka nasyconych kwasów tłuszczowych, wyciąg białkowy z drożdży (biało roślinne), lecytyna, witamina E, воск pszczelej, olej sojowy, alkohol stearylowy, chlorki wapnia, potasu i magnezu, glicerol monostearynowy, para hydroxybenzoesan metylu i propylu, antyutleniacz BHT.

Działanie:

- Hemostatyczna maść ochronna. **Wzmacnia działanie naturalnych czynników krzepnięcia krwi, tworzy mechaniczną barierę ochronną.**

Wskazania:

- **Emofix**, maść hemostatyczna stosowany w celu zapobiegania i powstrzymania krwawień ze skóry i błon śluzowych, krwawienia ze skóry lub błon śluzowych.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Sposób użycia:

- **Aby zahamować krwawienie:** należy pokryć odpowiednią ilością maści krwawiące miejsce.
- **Aby zapobiec nawrotom krwawienia:** stosować maść 2 razy dziennie, przez co najmniej 2 tygodnie po ostrym epizodzie krwawienia lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku stosowania na błonę śluzową nosa zaleca się użycie aplikatora dołączonego do opakowania.

Ostrzeżenia:

- W pierwszych dniach leczenia mogą pojawić się: **pieczenie, swędzenie w nosie lub wyciek z nosa**. Objawy te ustępują w trakcie terapii. W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie.
- Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu
- Po użyciu tubę mocno zakręcić.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza w oryginalnym opakowaniu
- Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości zamieszczonej na opakowaniu.

Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Podmiot odpowiedzialny:

DMG DRUGS MINERALS AND GENERICS, Via Laurentina Pomezia, Włochy

